

KATETERLERDE YIKAMA HACMI



Vasküler Girişim Cihazı	Tanım	Uç Yerleşimi	Salin Yıkama Hacimleri	Heparin kilidi ve konsantrasyon
Periferik kateter		Periferik Venler	2-3 ml	
Entegre CVP	"Y" veya üçlü musluk versiyonu	Periferik Venler	5 ml	
Orta hat	Tek veya ikili lümen*	Periferik Venler	10ml / lümen	2ml, 10-100 U/ml / lümen
PEYSAK (Periferden Yerleştirilen Santral Kateter)	Tek veya ikili lümen*	Superior Vena Cava	10ml / lümen	2-3ml, 10-100 U/ml / lümen
Perkütan SVK	Tek, ikili, beşliye kadar lümen	Superior Vena Cava	10ml / lümen	2-3ml, 10-100 U/ml / lümen
Tünelli SVK	Tek, ikili veya üçlü lümen*	Superior Vena Cava	10ml / lümen	3-5ml, 10-100 U/ml / lümen
Implant Port	Tek veya ikili lümen*	Superior Vena Cava	10ml / lümen	5ml, 10-100 U/ml / lümen
Aferez/hemodiyaliz kateteri	İkili lümen, geniş çaplı	Superior Vena Cava veya Sağ Atrium	10-20ml / lümen	3-5ml, 1000-5000 U/ml / lümen

*Bazı markalarda son Heparin Yıkaması ihtiyacını ortadan kaldıran integral bir valf bulunur.

*SVK: Santral Venöz Kateter



BD Medical Systems