

# Kolaylaştırılmış SARS-CoV-2 testini keşfedin!

BD Veritor™ Plus Sistem

Hasta başında Hızlı & Güvenilir SARS-CoV-2 testi

Taşınabilir, kolay kullanımlı BD Veritor™ Plus Sistem, güvenilir SARS-CoV-2 sonuçlarını 15 dakika içerisinde verir.

Bu ürün, CE-IVD ve FDA-EUA onaylıdır.



# SARS-CoV-2 testiniz kullanıma hazır

Hızlı, güvenilir bir SARS-CoV-2 testine ihtiyacınız olduğunda, BD Veritor™ Plus Sistem yanınızda. BD Veritor™ Plus Sistem, kolay bir iş akışına sahip, elde taşınabilen hasta başı bir test cihazıdır.

## Test işlemini kolaylaştırın

- Kolay iş akışı ve tek tuş ile sonuç verme işlevselliği manuel işlem hatalarını azaltır.
- Kullanıma hazır reaktif tüpleri ile örnek hazırlama işlemini kolaylaştırır.

## Hızlı-güvenilir sonuçlara ulaşın

- SARS-CoV-2 sonuçlarını, okunması kolay dijital ekranda 15 dakika içerisinde verir.
- Gelişmiş nano-partikül teknolojisi sayesinde duyarlılığı artırır; bu da test performansının iyileşmesine yardımcı olur\*
- Adaptif okuma teknolojisi ile nonspesifik bağlanmaları önleyerek yanlış-pozitif sonuçları azaltmak üzere özgüllüğün iyileşmesine yardımcı olur.

## İş akışında etkinlik sağlayın

- 2 farklı moduyla iş akışınıza kolaylıkla uyum sağlar.
  - **Analyze now:** Kart test, inkübasyon süresini tamamlandıktan sonra takılır; bu da çok sayıda örneğin art arda test edilmesini sağlar.
  - **Walk away:** Kart test, örnek inkübe olurken çalışanların başka işler yapabilmesini sağlayacak şekilde, hemen cihaza yerleştirilir.

## Sonuç izlenebilirliği sağlayın

- BD Veritor™ InfoScan modülü ile, numune barkod numarası ve test kayıtları yüklenir ve LIS (Laboratuvar Bilgi Sistemi) ile bağlantı sağlanarak sonuçlar izlenir.
- USB portu sayesinde sonuçların yazdırılmasını sağlar.

\*Gözle okunan testlerle karşılaştırıldığında

1. BD Veritor System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 package insert. Franklin Lakes, NJ: Becton, Dickinson and Company.

Becton Dickinson (BD), Ruzgarlıbahçe Mah. S.Sinan Eroglu Cad. No:6 Akel Is Merkezi A Blok -3. Kat 34805 Kavacik Beykoz, Istanbul Turkey, Phone: +902166801002

[bd.com/COVID-19](http://bd.com/COVID-19)

BD, BD logosu ve Veritor, Becton Dickinson and Company ya da iştiraklerinin markalarıdır. © 2020 BD. Her hakkı mahfuzdur. Temmuz 2020

## Klinik Performans<sup>1</sup>

PPA	NPA
%84	%100

\* PPA: Pozitif % Uyum  
NPA: Negatif % Uyum

## İş akışı




Örnek swabını tüpe yerleştirin ve 1-2 dakika inkübe edin.



Swabı solüsyon içinde 15 saniye yukarı ve aşağı hareket ettirin, ardından tüpü sıkarken swabı çıkarın.



Tüpün tırtıklı alanını sıkın, test cihazına 3 damla damlatın.

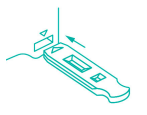

15 dakikalık inkübasyon süresi dolduktan sonra kart testi cihaza yerleştirin.

Sipariş bilgisi	Kat. no.	Miktar
BD Veritor™ SARS-CoV-2 Kit	256089	30 test
<b>BD Veritor™ ile ilişkili diğer ürünler</b>		
BD Veritor™ Flu A/B Lab Kit	256041	30 test
BD Veritor™ Flu A/B Kit	256045	30 test
BD Veritor™ RSV Kit	256038	30 test
BD Veritor™ RSV Lab Kit	256042	30 test
BD Veritor™ Strep A Kit	256040	30 test
BD Veritor™ Plus Sistem Okuyucu	256066	1
BD Veritor™ InfoScan modül	256068	1

Negatif test sonuçları enfeksiyonu dışlamayıp, özellikle COVID-19 ile uyumlu bulgu ve semptomların bulunduğu ya da virüsle temas etmiş olan kişilerde, enfeksiyon kontrol kararları dahil olmak üzere, tedavinin ya da hasta yönetim kararlarının tek dayanağı olmamalıdır. Negatif sonuçlar, hastanın son günlerde virüse maruz kalmış olması, öyküsü ve COVID-19 ile uyumlu bulgu ve semptomlarının bulunması bağlamında değerlendirilip, gerektiğinde, tedavi için moleküler bir testle doğrulanmalıdır.

