



BD AutoShield™ Duo
Güvenlikli Kalem İğnesi

KULLANIM
KILAVUZU

1 Güvenlikli insülin kalem iğnesi **üç parçadan** oluşur.



2 İğneyi kullanmak için **soyulabilir etiketi** açınız.



3 Koruyucu kapağı çıkarmadan önce iğneyi insülin kaleminin ucuna yerleştiriniz, çevirerek kaleme oturtunuz.



4 Koruyucu kapağı insülin kalem iğnesinden hafifçe çekerek çıkarınız, işlemin sonunda kullanmak üzere saklayınız.



5 Kaleminiz şeklindeki gibi gözükmelidir.



İğne ucu koruyucu
şeffaf bir
kalkan içerisindedir.



Enjeksiyonu gerçekleştirene kadar koruyucu şeffaf kalkanı bastırmayınız.





6 Her enjeksiyondan **önce** kalem iğnesinden insülin akışı kontrol edilmelidir. Kaleminizi **1 Üniteye** ayarlayın ve kalemi **dik tutarak** iğne ucunu yukarı çevirin, kalemin arkasına basarak en azından **1 damla** insülinin kalem iğnesi ucundan akmasını sağlayınız.



İnsülin damlaları kalem iğnesinin ucuna düşebilir. Bu durum, enjeksiyon sonrası deri üzerinde ıslaklığa sebep olabilir.


7 Uygulamanız gereken **insülin dozunu** kalem üzerinde ayarlayınız.

8 İnsülin kalemini enjeksiyon bölgesine **90 derece dik** açıyla, yani kalemi eğmeden batırınız. İğne enjeksiyon bölgesine tamamen battığında **tık sesini duyacaksınız.**

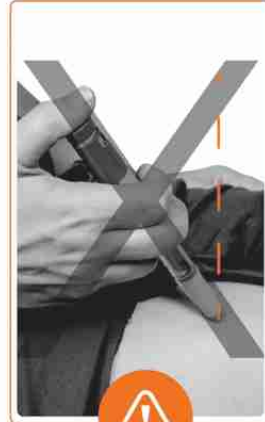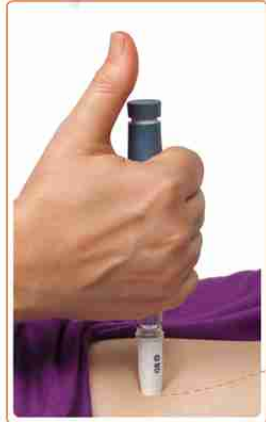

İnsülin kalemini enjeksiyon bölgesine eğik uygulamayın.

Tık sesini duyduktan sonra kalemin arkasına baş parmağınızla bastırarak insülini enjekte ediniz. Kalemi enjeksiyon bölgesinden çekmeden önce **10'a kadar** sayınız.

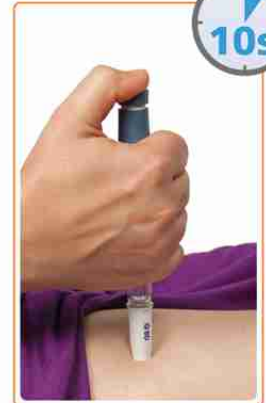

Kas içi enjeksiyonu önlemek için çok zayıf çocuk ve düşük yağ oranına sahip yetişkinlerde deri kıvrımı gerekebilir.

9 Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra, iğne ucunda **kırmızı** bir şerit belirecektir. Bu şerit koruyucu kalkanın kilitlendiğini gösterir, kalem iğnesi **tekrar kullanılamaz.**



10 Enjeksiyon sonrası kalem iğnesini insülin kaleminden **dikkatlice çevirerek** ayırınız.

11 Kalem iğnesini insülin kaleminden ayırdığınızda iğnenin arka ucunda **turuncu bir kapak** belirecektir.



12 İğne hem ön hem arka ucundan kilitlenerek hapsolur ve böylece **iğne batmalarının** önüne geçilmiş olur.



13 Kullanılmış iğne ucunu koruyucu kapak içerisine tekrar yerleştiriniz, **atık kutusuna** atınız.