

BD Microtainer® Güvenlikli Lancet

Tek Kullanımlık, Temasla Çalışan Lancet



Daha az acı, daha yüksek konfor

◆ Kullanıcı konforunu artırır

- Ergonomik tasarımlı daha rahat kavranır, kullanıcıya daha fazla güven verir
- Parmağı delerken tutması kolaydır
- Ürün aktivasyonu sırasında oluşabilecek kaymaları en aza indirir

◆ Temasla aktifleşir

- Sadece parmağa doğru konumlandırılıp bastırıldığında aktifleşir
- Kan alımı için yeterli derinliği sağlar
- Kullanım öncesi iğne batma yaralanmalarının önüne geçer

◆ İstenilen noktanın delinmesini sağlar

- Delinecek noktanın görünürüğünü artıracak şekilde, temas noktası üzerinde sadece küçük bir alanı kapsar

◆ Kullanıcı güvenliğini artırır

- Kullanım sırasında ve sonrasında oluşabilecek iğne batma yaralanmalarının önüne geçer
- Tek kullanımlıktır, tekrar kullanımdan kaynaklanabilecek komplikasyonların önüne geçirir

BD Microtainer® Güvenlikli Lancet

Kullanım Talimatları

- 1 Giriş yapılacak bölgeyi seçin (koyu alan) ve bölgeyi temizleyin.



- 2 Kapağı çevirip çekerek çıkartın.



- 3 Güvenlikli lanceti resimdeki gibi giriş yapacağınız noktaya, parmaklarınızın arasında tutarak yerleştirin.



- 4 Delme işlemi için lanceti tık sesini duyana kadar parmağınıza bastırın.



- 5 Kullanılan lanceti uygun bir kaba atın.



30 G, 200 adet Lancet

**Güvenlikli,
tek kullanımlık lancet**