



Uygulama şekli:

Çoğu hastada, enjeksiyon bölgelerinde **deri kıvrımına gerek duyulmaksızın tek el ve dik açıyla** enjeksiyon kolaylığı sağlar.

*Çocuklarda ve zayıf yetişkinlerde deri kıvrımına ihtiyaç duyulabilir.

- Ürünün son kullanma tarihini kontrol edin, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.
 - Her enjeksiyonda kalem iğnesini değiştiriniz.
 - İğneyi kaleme yerleştirdikten sonra, enjeksiyon yapmadan önce insülin akışını kontrol ediniz.
 - Doktorunuz veya hemşireniz tarafından önerilen enjeksiyon tekniğini ve insülin kalemi kullanım talimatlarını dikkate alarak enjeksiyonunuzu yapınız.
 - Doğru enjeksiyon tekniği için [İnsülin / GLP 1 Kullananlar için Enjeksiyon Rehberi](#)'ni inceleyebilirsiniz.
- Tam dozu enjekte edebilmek için, enjeksiyondan sonra iğneyi derinizden hemen çıkarmayınız; yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra iğneyi derinizden çıkarınız.
- Güvenliğiniz için olası iğne batma yaralanmalarından korunmak amacıyla, enjeksiyon sonrası kalem iğnesini insülin kaleminden çıkarın ve atık kutusuna atınız. İğnelerinizi evsel atıklarınızı attığınız çöpe atmayınız.

Uygun enjeksiyon tekniği için lütfen doktorunuza veya hemşirenize danışınız.