

# BD PosiFlush™ XS et SP

Seringues pré-remplies de NaCl 0,9% pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaires

## BD PosiFlush™ XS Intérieur et extérieur stérile

Pour utilisation  
sur champ stérile



## BD PosiFlush™ SP Intérieur stérile et extérieur propre

Pour utilisation  
hors champ stérile



## Recommandations d'utilisation

### 1. PRÉPARATION



**Débloquer le témoin d'intégrité** en poussant sur la tige de piston avant de dévisser le protège-embout.

Un CLIC audible confirme l'opération.

### 2. PURGE



**Dévisser le protège-embout** de la seringue.



Purger l'air de la seringue en poussant légèrement le piston.

# BD PosiFlush™ XS et SP

Seringues pré-remplies de NaCl 0,9% pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaires

## 3. CONNEXION



Connecter l'embout **Luer Lock** à l'embase du dispositif médical.

## 4. RINÇAGE PULSÉ



Pour un rinçage efficace, il est conseillé d'effectuer le **rinçage par pressions successives** en actionnant le piston en 5 poussées\*.

## 5. ÉLIMINATION



Après utilisation, **éliminer la seringue** selon les pratiques en vigueur pour l'élimination des déchets.

Ne pas réutiliser.

\* Guiffant et al. *Flushing of intravascular access devices (IVADs). Efficacy of pulsed and continuous infusions.* J Vasc Access, 2012.