
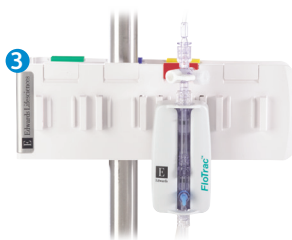


Capteur FloTrac

Guide de configuration

- 1 Allumer le moniteur et raccorder le câble de pression HemoSphere à la plateforme de surveillance HemoSphere.
- 2 Sélectionner le mode de surveillance **mini-invasif**, puis **Démarrer la surveillance**.
- 3 Ouvrir l'emballage du capteur FloTrac et vérifier son contenu. Monter le capteur FloTrac sur un pied à perfusion à l'aide du support prévu à cet effet.
- 4 Pour éliminer l'air de la poche de rinçage IV, retourner d'abord la poche de perfusion. Perforer la poche et maintenir la chambre compte-gouttes en position verticale. S'assurer que tout l'air a été éliminé. Insérer la poche de perfusion dans la poche de pression et la suspendre au pied à perfusion (ne pas gonfler).
- 5 Pour amorcer le capteur FloTrac : par gravité uniquement (sans pression dans la poche de pression), rincer le capteur FloTrac en tirant sur la purge Snap-Tab, tout en maintenant la tubulure de pression en position verticale jusqu'à ce que la colonne de fluide atteigne l'extrémité de la tubulure.
- 6 Remplacer tous les bouchons d'origine par des bouchons hermétiques et vérifier que tous les raccords sont étanches.

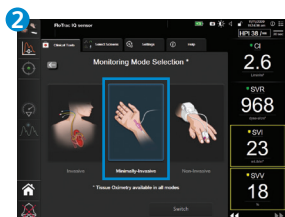

- 7 Pressuriser la poche de perfusion jusqu'à ce qu'elle atteigne 300 mmHg, puis rincer rapidement le capteur conformément à la procédure de l'hôpital et tapoter la tubulure et les robinets pour éliminer les bulles résiduelles.
- 8 Raccorder le connecteur vert du capteur FloTrac au câble de pression HemoSphere.
- 9 Raccorder le connecteur rouge du capteur FloTrac au câble du scope patient.
- 10 Raccorder la tubulure au cathéter artériel.
- 11 Aligner le capteur FloTrac au niveau de l'axe phlébostatique. **Remarque : il est important de maintenir systématiquement le capteur FloTrac au niveau de l'axe phlébostatique afin de garantir la précision du débit cardiaque.**
- 12 Pour la remise à zéro, fermer le robinet d'arrêt vers le patient et ouvrir côté atmosphère :
 - 1 Appuyer longuement sur le bouton Remise à zéro du câble de pression pour afficher l'écran Remise à zéro.
 - 2 Appuyer longuement sur le bouton Remise à zéro jusqu'à ce qu'une tonalité retentisse pour terminer la remise à zéro.



Ou

La remise à zéro peut également se faire en sélectionnant le bouton **Remise à zéro rapide** pour afficher l'écran Remise à zéro, puis **Remise à zéro**.



CE 0123

BD, Eysins, Vaud, Suisse

bd.com

BD, le logo BD, FloTrac et HemoSphere sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company et de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

© 2026 BD. Tous droits réservés. BD-173948 v1.0 UE

