



FloTrac-Sensor

Einrichtungsanleitung

- 1 Schalten Sie den Monitor ein und schließen Sie das HemoSphere-Druckkabel an die HemoSphere-Überwachungsplattform an.
- 2 Wählen Sie die **minimal-invasive** Technologie aus und wählen Sie dann **Überwachung starten**.
- 3 Öffnen Sie die Verpackung des FloTrac-Sensors und prüfen Sie den Inhalt. Befestigen Sie den FloTrac-Sensor mit einer geeigneten Halterung an einem Infusionsständer.

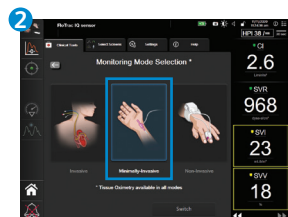

- 4 Um die Luft aus dem Infusionsbeutel zu entfernen, drehen Sie den Infusionsbeutel zunächst um. Punktieren Sie den Beutel und halten Sie die Tropfkammer aufrecht. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Luft entfernt wurde. Legen Sie den Infusionsbeutel in den Druckbeutel und hängen Sie ihn am Infusionsständer auf (ohne ihn aufzupumpen).
- 5 Vorfüllen des FloTrac Sensors: Spülen Sie den FloTrac Sensor nur mit Hilfe der Schwerkraft (ohne Druck im Druckbeutel), indem Sie an der Snap-Tab-Vorrichtung ziehen, während Sie den Druckschlauch in aufrechter Position halten, bis die Flüssigkeitssäule das Ende des Schlauchs erreicht.
- 6 Ersetzen Sie alle belüfteten Schutzkappen durch nicht belüftete Schutzkappen und stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse dicht sind.

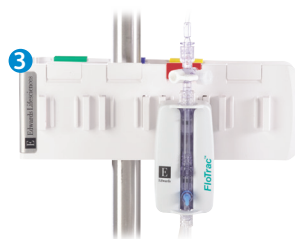

7 Setzen Sie den Infusionsbeutel unter Druck, bis er 300 mmHg erreicht, spülen Sie dann den Sensor gemäß den Krankenhausrichtlinien schnell durch und klopfen Sie auf die Schläuche und Absperrhähne, um etwaige Restblasen zu entfernen.

8 Stecken Sie den grünen Stecker des FloTrac Sensors in das HemoSphere Druckkabel.

9 Stecken Sie den roten Stecker des FloTrac Sensors in das bettseitige Kabel.

10 Schließen Sie den Schlauch an den Arterienkatheter an.

11 Stellen Sie den FloTrac Sensor auf die phlebostatische Achse ein.

Hinweis: Es ist wichtig, dass der FloTrac-Sensor sich jederzeit auf Höhe der phlebostatischen Achse befindet, damit die Genauigkeit des Herzzeitvolumens sichergestellt ist.

12 Zur Nullstellung den Absperrhahn zum Patienten hin schließen und zur Luft hin öffnen:

1 Halten Sie die Nullstellungstaste an der Druckleitung gedrückt, um den Null-Bildschirm aufzurufen.

2 Halten Sie die Nullstellungstaste gedrückt, bis ein Ton zu hören ist, um die Nullstellung abzuschließen.

Oder

Das Nullstellen kann auch abgeschlossen werden, indem Sie die Taste **Schnelle**

Nullstellung auswählen, um den Bildschirm für die Nullstellung aufzurufen, und dann **Nullstellung** auswählen.



CE 0123

BD, Eysins, Vaud, Schweiz

bd.com

BD, das BD-Logo, FloTrac und HemoSphere sind Marken von Becton, Dickinson und Company und seinen Tochterunternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© 2026 BD. Alle Rechte vorbehalten. BD-173944 v1.0 EU

