
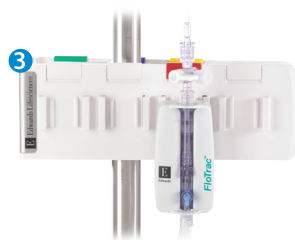


Sensore FloTrac

Guida alla configurazione

- 1 Accendere il monitor e collegare il cavo di pressione HemoSphere alla piattaforma di monitoraggio HemoSphere.
- 2 Selezionare la tecnologia **mini-invasiva**, quindi selezionare **Avvia monitoraggio**.
- 3 Aprire la confezione del sensore FloTrac e ispezionarne il contenuto. Montare il sensore FloTrac su un'asta per fleboclisi utilizzando il supporto appropriato.
- 4 Per rimuovere l'aria dalla sacca di irrigazione EV, prima capovolgere la sacca per EV. Perforare la sacca e mantenere la camera di gocciolamento in posizione verticale. Verificare che tutta l'aria sia stata rimossa. Inserire la sacca per EV nella sacca a pressione e appenderla all'asta per fleboclisi (non gonfiare).
- 5 Per eseguire il priming del sensore FloTrac: con il solo ausilio della gravità (senza pressione nella sacca a pressione), irrigare il sensore FloTrac tirando il dispositivo Snap-Tab, mantenendo il tubo della pressione in posizione verticale finché la colonna di fluido non raggiunge l'estremità del tubo.
- 6 Sostituire tutti i tappi con tappi non ventilati e assicurarsi che tutti i collegamenti siano saldi.

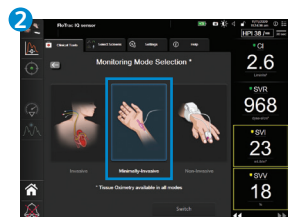

7 Pressurizzare la sacca per EV fino a raggiungere 300 mmHg, quindi irrigare rapidamente il sensore secondo il protocollo ospedaliero e picchiettare su tubi e rubinetti per rimuovere eventuali bolle residue.

8 Collegare il connettore verde dal sensore FloTrac al cavo di pressione HemoSphere.

9 Collegare il connettore rosso dal sensore FloTrac al cavo al posto letto.

10 Collegare il tubo al catetere arterioso.

11 Portare il sensore FloTrac a livello dell'asse flebostatico. **Nota: è importante mantenere sempre il sensore FloTrac a livello dell'asse flebostatico per assicurare misurazioni accurate della gittata cardiaca.**


12 Per azzerare, chiudere il rubinetto verso il paziente e aprirlo verso l'aria:

1 Tenere premuto il pulsante di azzeramento sul cavo di pressione per visualizzare la schermata di azzeramento.

2 Per completare l'azzeramento, tenere premuto il pulsante di azzeramento fino a quando non si avverte un segnale acustico.

Oppure

L'azzeramento può anche essere completato selezionando il pulsante **Zero rapido** per visualizzare la schermata di azzeramento, quindi selezionando **Zero**.

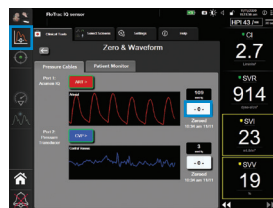

CE 0123

BD, Eysins, Vaud, Svizzera

bd.com

BD, il logo BD, FloTrac e HemoSphere sono marchi di Becton, Dickinson and Company o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2026 BD. Tutti i diritti riservati. BD-173947 v1.0 EU

