
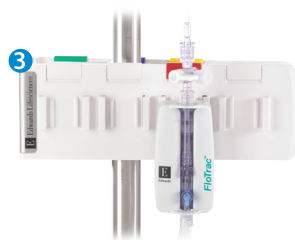


Sensor FloTrac

Guía de configuración

- 1 Encienda el monitor y conecte el cable de presión HemoSphere a la plataforma de monitorización HemoSphere.
- 2 Seleccione la tecnología **mínimamente invasiva** y, a continuación, seleccione **Iniciar monitorización**.
- 3 Abra el paquete del sensor FloTrac e inspeccione su contenido. Coloque el sensor FloTrac en un palo de gotero utilizando el soporte adecuado.
- 4 Para eliminar el aire de la bolsa de lavado intravenoso, primero invierta la bolsa intravenosa. Perfore la bolsa y mantenga la cámara de goteo en posición vertical. Asegúrese de haber retirado todo el aire. Inserte la bolsa intravenosa en la bolsa de presión y cuélguela de un palo de gotero (no la infle).
- 5 Para cebar el sensor FloTrac: con solo gravedad (sin presión en la bolsa de presión), lave el sensor FloTrac tirando del dispositivo Snap-Tab, mientras sostiene el tubo de presión en posición vertical hasta que la columna de fluidos llegue al final del tubo.
- 6 Reemplace todos los tapones por tapones no venteados y asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas.

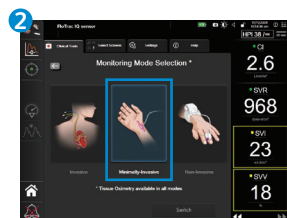

- 7 Presurice la bolsa intravenosa hasta que alcance los 300 mmHg, a continuación, lave rápidamente el sensor según la política del hospital y dé golpecitos a los tubos y las llaves de paso para eliminar las burbujas residuales.
- 8 Enchufe el conector verde del sensor FloTrac al cable de presión HemoSphere.
- 9 Enchufe el conector rojo del sensor FloTrac al cable de cabecera.
- 10 Conecte el tubo al catéter arterial.
- 11 Nivele el sensor FloTrac con el eje flebostático.
Nota: Es importante mantener la llave de paso del sensor FloTrac al nivel del eje flebostático en todo momento para garantizar la precisión del gasto cardíaco.
- 12 Para ponerlo a cero, cierre la llave de paso al paciente y ábrala al aire atmosférico:
 - 1 Mantenga pulsado el botón de cero en el cable de presión para abrir la pantalla de cero.
 - 2 Mantenga pulsado el botón de cero hasta que se escuche un tono para completar la puesta a cero.



La puesta a cero también se puede realizar seleccionando el botón **Puesta a cero rápida** para abrir la pantalla de cero, y seleccionando a continuación **Cero**.

Producto sanitario para uso profesional.  0123

BD, Eysins, Vaud, Suiza

bd.com

BD, el logotipo de BD, FloTrac y HemoSphere son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company y sus filiales. Edwards, Edwards Lifesciences y el logotipo estilizado de la E son marcas comerciales de Edwards Lifesciences Corporation. Todas las demás marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2025 BD. Todos los derechos reservados. BD-170566 v1.0

