

ClearSight Jr Cuff Monitor HemoSphere

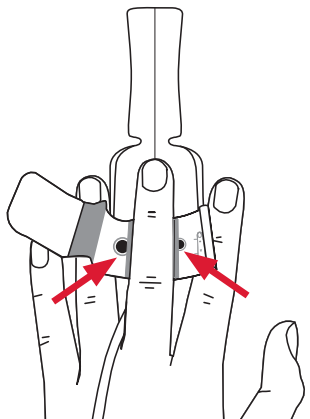
Acesse parâmetros hemodinâmicos avançados e pressão arterial contínua, não invasiva, para ajudar a otimizar o manejo de pressão e fluxo.

Guia rápido de configuração

ClearSight Jr cuff*

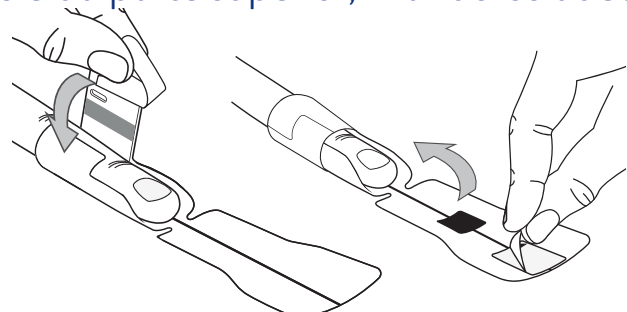
1

Alinhamento
Certifique-se de que o sensor esteja devidamente alinhado lateralmente no dedo (**o emissor e receptor devem estar alinhados lado a lado**), e aplicado na falange média, entre a segunda e terceira articulação.
Nota: Não aplique o cuff no polegar, mínimo ou dedos previamente fraturados.

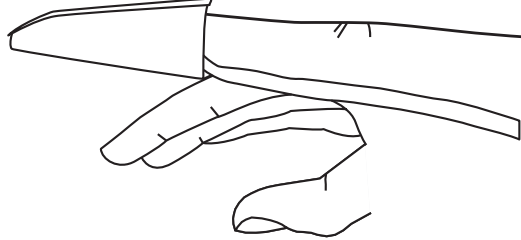


2

Aplicação
Deixe o cuff envolver o dedo e, em seguida, puxe os adesivos das laterais e da parte superior, fixando-os adequadamente.

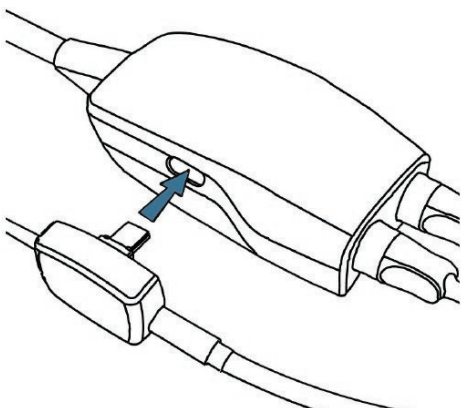


3

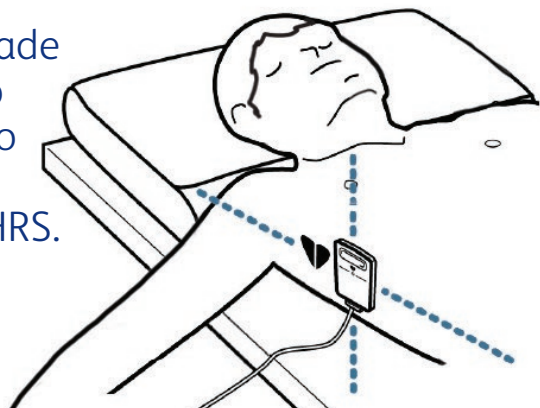
Segurança
O cuff deve estar bem ajustado para não se deslocar. Quando colocado corretamente, o cabo do cuff fica apontado para o pulso, na parte inferior do dedo.


Sensor de referência cardíaca (HRS)

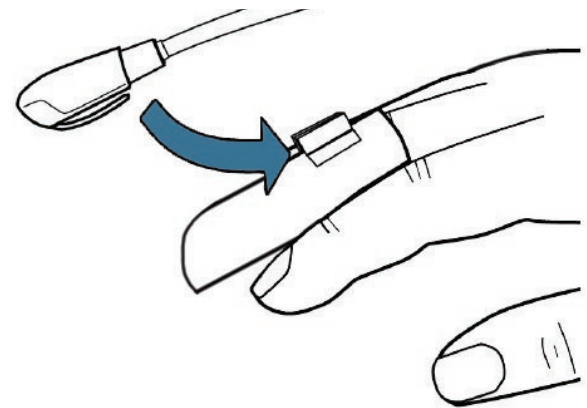
1

Conecte
Certifique-se de que o sensor de referência cardíaca (HRS) esteja conectado ao controlador de pressão.


2

Clipe
Aplique a extremidade cardíaca do HRS ao paciente no nível do eixo flebotático usando o clipe do HRS.


3

Prenda
Prenda a outra extremidade do HRS no cuff.


4

Iniciar monitorização
Toque no ícone de iniciar monitorização na barra de navegação para começar a monitorar.


O que observar na tela



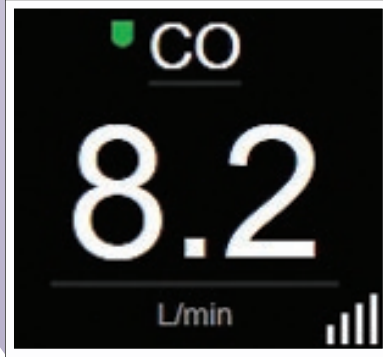
Physiocal

O Physiocal monitora mudanças no tônus vascular e calibra as leituras adequadamente. Pode-se notar uma forma de onda em degrau durante esses intervalos de calibração. Esta interrupção momentânea da onda arterial é normal.



Barra de status:

Observe a barra de status para falhas ou alertas (ex.: ícone de interrogação) e toque para mais informações.



Indicador de Qualidade do Sinal (IQS):

Semelhante a um celular: mais barras indicam sinal mais forte. O IQS é atualizado a cada 20 segundos. Se o IQS tiver menos de 3 barras, verifique as conexões e alertas na tela.

Dicas e lembretes rápidos

- Assegure que o fluxo sanguíneo para a mão não esteja obstruído; certifique-se de que a mão do paciente está relaxada e aquecida.
- Sempre garanta que o HRS esteja no mesmo nível vertical do coração; reajuste conforme necessário.
- Se as medições de pressão arterial com o ClearSight Jr cuff variarem em relação a uma medida de referência, avalie a integridade do HRS realizando uma calibração do HRS: Ícone de configurações > Guia de Ferramentas Clínicas > Ícone de Calibração HRS.
- Certifique-se de que o HRS não está vencido; substitua se necessário.
- Intervalo Physiocal ≥ 30 batimentos é considerado confiável.

Possíveis causas de medições não invasivas imprecisas:

- HRS calibrado e/ou nivelado de forma inadequada
- Variações excessivas na pressão arterial
- Situações clínicas em que a pressão arterial não é considerada precisa ou representativa da pressão aórtica
- Má circulação sanguínea nos dedos
- Cuff dobrado ou achatado
- Movimento excessivo de dedos ou mãos do paciente
- Artefatos e baixa qualidade do sinal
- Posição ou colocação incorreta do cuff, ou cuff muito frouxo
- Interferência de eletrocautério ou bisturi elétrico

* O ClearSight Jr cuff é indicado para pacientes com 12 anos ou mais.

Exclusivo para uso de profissionais. Consulte as instruções de uso para obter informações completas de prescrição, incluindo indicações, contraindicações, avisos, precauções e eventos adversos.

Produto comercializado no Brasil pela Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda. sob os Registros Sanitários: ClearSight, 80219050158; HemoSphere 80219050168.

BD, o logotipo BD, ClearSight, ClearSight Jr e HemoSphere são marcas registradas da Becton, Dickinson and Company ou suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

©2025 BD. Todos os direitos reservados. BD-165626 v1.0

