


Sistema Não Invasivo com ClearSight Jr Cuff (> 12 anos)

Guia de Configuração

Figura 1

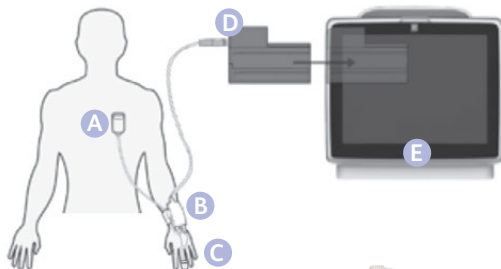

- 1: Insira o módulo HemoSphere ClearSight **D** no maior slot do módulo da plataforma **E**. Você ouvirá um clique quando o módulo estiver devidamente encaixado. Pressione o botão Ligar na parte da frente do monitor
- 2: Selecione o botão “novo paciente” e insira os dados do paciente; em seguida selecione o botão “não invasivo” na janela “seleção do modo de monitorização

Observação: Se os dados demográficos não forem preenchidos, apenas os seguintes parâmetros poderão ser monitorados:
SYS_{art}, DIA_{art}, PAM, FP.

- 3: Conecte o controlador de pressão **B** ao módulo HemoSphere ClearSight **D**



A. Sensor de referência cardíaca



B. Controlador de pressão



C. ClearSight Jr cuff*



D. Módulo HemoSphere ClearSight




E. Monitor HemoSphere

* O ClearSight Jr cuff é indicado para pacientes com 12 anos ou mais


- 4: Abra suavemente o cuff e coloque-o na falange média do dedo indicador, médio ou anelar; assegure que o cuff esteja centralizado entre a segunda e terceira articulação, e que as duas linhas verdes no interior do cuff estejam alinhadas (Figura 2); não aplique o cuff no polegar, dedo mínimo ou dedos previamente fraturados

Figura 2

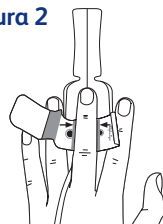


- 5: Enrole o cuff em volta do dedo; não gire o cuff após sua aplicação (Figura 3)

Figura 3

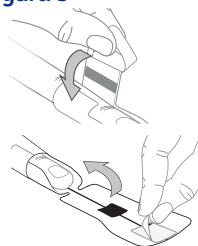

- 6: Passe suavemente o cabo do cuff entre dois dedos até o dorso da mão (Figura 4)


Figura 4

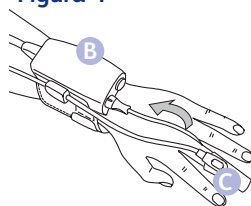

- 7: Conecte o cuff **C** ao controlador de pressão **B** (Figura 5)


- 8: Conecte o sensor de referência cardíaca (HRS) **A** ao controlador de pressão (Figura 5) **B**

Figura 5

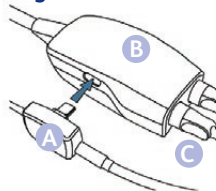

- 9: Fixe a extremidade cardíaca do HRS ao paciente, no nível do eixo flebostático, utilizando um clipe do HRS (Figura 6) e conecte a outra extremidade do HRS ao cuff (Figura 7)

Figura 6

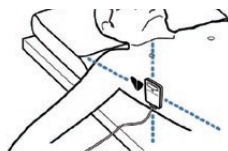


- 10: Toque no ícone de iniciar monitorização  na barra de navegação do monitor HemoSphere para começar a monitorizar

- 11: Toque no ícone inicial  para retornar à tela principal de monitorização

Figura 7



Plataforma de monitorização avançada HemoSphere: Navegação do sistema

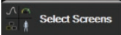- 1: Toque no ícone de configurações  e escolha a guia “Selecionar Telas”  para selecionar a visualização desejada da tela de monitorização
- 2: Os mosaicos de parâmetros estão localizados no lado direito da tela de monitorização. Para alterar o parâmetro, toque no rótulo do parâmetro exibido. O menu de configurações em mosaico mostrará o parâmetro selecionado destacado em cores. Os parâmetros disponíveis aparecem sem destaque; toque em qualquer parâmetro para selecionar o parâmetro de substituição



- 3: Para ajustar os alarmes/alvos, toque no ícone de configurações  → configuração avançada (consulte o seu representante para obter a senha) → configurações do parâmetro → alarmes e alvos
- 4: Se desejar, as saídas da plataforma de monitorização avançada HemoSphere poderão ser conectadas a um monitor de cabeceira e um segundo cabo de pressão poderá ser adicionado (consulte o guia de solução geral de problemas)

Exclusivo para uso de profissionais. Consulte as instruções de uso para obter informações completas de prescrição, incluindo indicações, contraindicações, avisos, precauções e eventos adversos.

Produto comercializado no Brasil pela Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda. sob os Registros Sanitários: ClearSight, 80219050158; HemoSphere, 80219050168.

BD, BD logo, ClearSight, ClearSight Jr e HemoSphere são marcas registradas da Becton, Dickinson and Company ou suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

©2025 BD. Todos os direitos reservados. BD-164027 v1.0

