


Sensor FloTrac Jr

Guia de Configuração

1. Ligue o monitor e conecte o cabo de pressão HemoSphere à plataforma de monitorização avançada HemoSphere.
2. Após inserir os dados do paciente, selecione tecnologia **minimamente invasiva** e, em seguida, selecione **Iniciar Monitorização**.
3. Utilizando técnica asséptica, remova o sensor FloTrac Jr e o kit da embalagem estéril.
4. Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras, mas não excessivamente apertadas. Substitua todas as tampas ventiladas nas portas laterais das torneiras por tampas não ventiladas.
5. Monte o sensor em um suporte de infusões usando um suporte adequado para o sensor.
6. Para retirar o ar da bolsa de soro, primeiro inverta a bolsa. Espete a bolsa e mantenha a câmara de gotejamento na posição vertical. Certifique-se de que todo o ar foi removido. Insira a bolsa de soro na bolsa de pressão e pendure-a no suporte de infusões (não infle).
7. Não pressurize a bolsa para preparar o sistema – use apenas a gravidade. Lave o sensor FloTrac Jr puxando o dispositivo Snap-Tab, enquanto segura o tubo de pressão na posição vertical até que a coluna de fluido atinja a extremidade do tubo.
8. Pressurize a bolsa de pressão até chegar a 300 mmHg, depois faça o flush do sensor de acordo com o protocolo do hospital e certifique-se que não ficaram bolhas residuais no sistema.

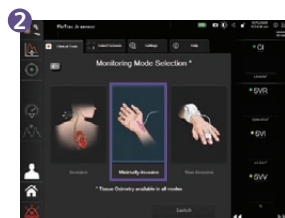

9. Acople o conector verde do sensor FloTrac Jr ao cabo de pressão HemoSphere.
10. Acople o conector vermelho do sensor FloTrac Jr ao cabo do monitor de cabeceira.
11. Conecte o tubo ao cateter arterial.
12. Nivele o sensor FloTrac Jr no eixo flebostático.
Observação: É importante manter o nível do sensor FloTrac Jr no eixo flebostático em todos os momentos para garantir a precisão do débito cardíaco.
13. Para zerar, abra a válvula da torneira do sensor para medir as condições atmosféricas.
 - i. Pressione e segure o botão físico zero no cabo de pressão (a).
 - ii. Quando a zeragem for concluída, um sinal sonoro será emitido e a mensagem "Zerado" será exibida com hora e a data.

Ou

Toque no botão zero localizado na tela.
14. Abra a torneira novamente para o paciente e confirme que o traçado está presente.



Exclusivo para uso de profissionais. Consulte as instruções de uso para obter informações completas de prescrição, incluindo indicações, contraindicações, avisos, precauções e eventos adversos.

Produto comercializado no Brasil pela Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda. sob os Registros Sanitários: Sensor FloTrac Jr, 80219050086; HemoSphere, 80219050168.

BD, BD logo, HemoSphere, FloTrac e FloTrac Jr são marcas registradas da Becton, Dickinson and Company ou suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

©2025 BD. Todos os direitos reservados. BD-164028 v1.0

