



Helping all people  
live healthy lives

BD PhaSeal™ Hanteringsanvisning

# Sluten läkemedelsöverföring

Från flaska till patient

# BD PhaSeal™ - ett unikt koncept

BD PhaSeal™ är ett slutet system för läkemedelshantering som mekaniskt förhindrar att läkemedelsaerosoler eller gas släpps ut vid beredning och administrering. BD PhaSeal™ har torra läckagefria membrankopplingar som förhindrar läkemedelsexponering vid till- och frånkoppling till flaskor, sprutor, infusionspåsar och intravenösa infarter.

Trots att systemet består av ett fåtal komponenter kan BD PhaSeal™ hantera de flesta typer av infusionsaggregat och sprutor för total säkerhet och bekväm administrering av läkemedel.



## Injector

Injector garanterar en sluten läkemedelsöverföring från läkemedelsflaska till spruta och vidare till patient.



## Protector

Protector är ett hjälpmedel för tryckutjämning som sätts fast på läkemedelsflaskan och används vid beredning av läkemedlet.



## Connector

Connector används vid sluten administrering av läkemedel och ger säkra till- och frånkopplingar.



## Att ansluta med BD PhaSeal™

Injector har en ergonomisk utformning som underlättar användningen utan att kompromissa med din säkerhet. Med ett enkelt enhandsgrepp får du säkra till- och frånkopplingar: **tryck - vrid - tryck**.



### Tryck

Sätt ihop Injector med Connector-delen genom att passa in vingarna i motsvarande skåror



### Vrid

Håll i det vita greppet och vrid.



### Tryck


Tryck nedåt för att aktivera Injector.

För att koppla ifrån, vänd på arbetsstegen: **dra - vrid - dra**.

# Beredning av läkemedel från flaska...

## Utrustning som krävs för att genomföra proceduren

- Spruta
- Injector - välj Injector utifrån typ av spruta, Luer eller Luer-Lock
- Protector - välj storlek utifrån flaskans halsvidd och beredningsvolym
- Läkemedelsflaska

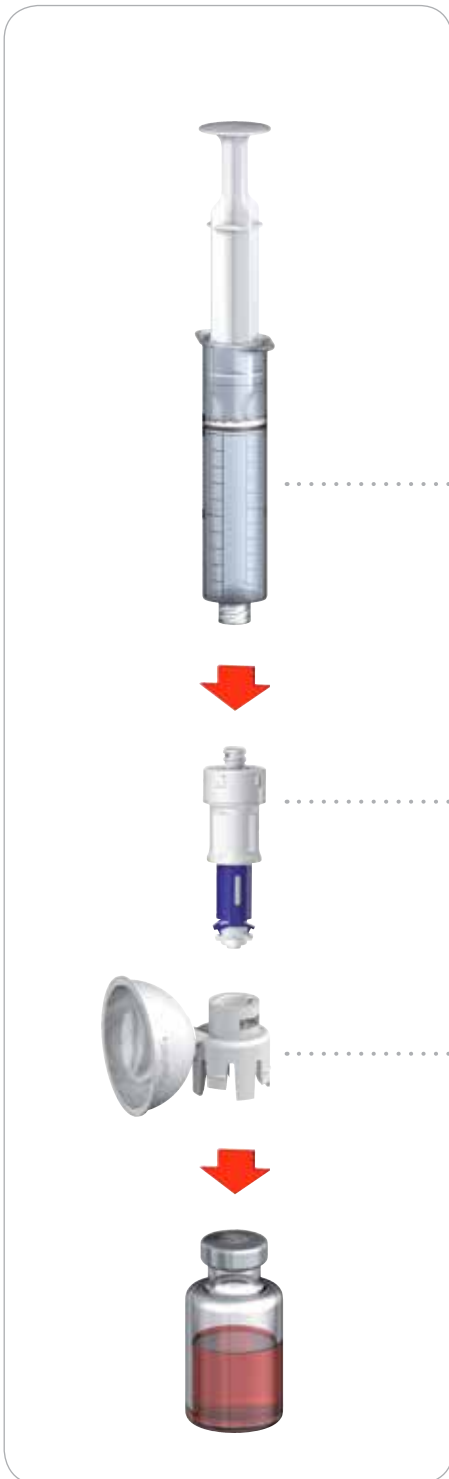

Fyll sprutan med en luftvolym som motsvarar doseringsvolymen eller anvisad spädningsvätska innan den kopplas ihop med Injector.

Montera Injector på sprutan.

Montera Protector på flaskan.

*Obs: Följ lokala aseptiska riktlinjer och procedurer.*

## ...till spruta



1. Koppla ihop.  
Tryck - vrid - tryck.



2. Håll flaskan upprätt och spruta ned spänningsvätskan eller luften i flaskan.



3. Vänd systemet upp och ned och aspirera läkemedlet.



4. Koppla ifrån.  
Dra - vrid - dra.

# ...till infusionspåse



1. Koppla ihop.



2. Spruta in läkemedlet i infusionspåsen.



3. Koppla ifrån.



Anslut valfri BD PhaSeal™ produkt för infusion.



## ...till patient

1a



1a. Läkemedel från spruta...

1b



1b...eller från infusionspåse...

2



2. ...till patienten via en Connector.

Kontakta din lokala BD representant för mer information eller  
besök oss på  
[www.bd.com/se](http://www.bd.com/se)



**BD Medical**  
Becton Dickinson AB  
Box 47204  
100 74 Stockholm  
[bdsweden@europe.bd.com](mailto:bdsweden@europe.bd.com)  
[www.bd.com/se](http://www.bd.com/se)