

BD Sistema Veritor™ para la detección rápida del SARS-CoV-2

Recolección de muestras mediante hisopado nasal adecuado

Para uso bajo Autorización de Uso de Emergencia (EUA)

1


El Kit del Sistema BD Veritor™ para el SARS-CoV-2 incluye hisopos para la recolección de muestras nasales.

2




Inserte cuidadosamente el hisopo en una fosa nasal. La punta del hisopo debe insertarse hasta 2,5 cm (1 pulgada) del borde de la fosa nasal. Pasar el hisopo 5 veces a lo largo de la mucosa dentro de las fosas nasales para asegurar la recolección tanto del moco como de las células.

3

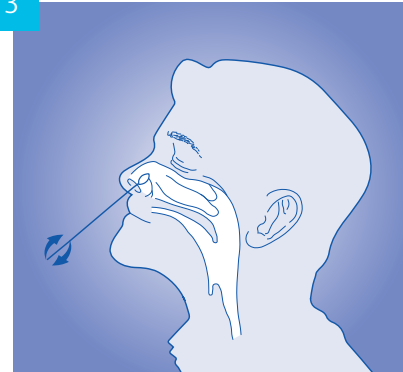

Utilizando el mismo hisopo, repetir este proceso en la otra fosa nasal para asegurarse que se recolecte una muestra adecuada de ambas cavidades nasales.

4

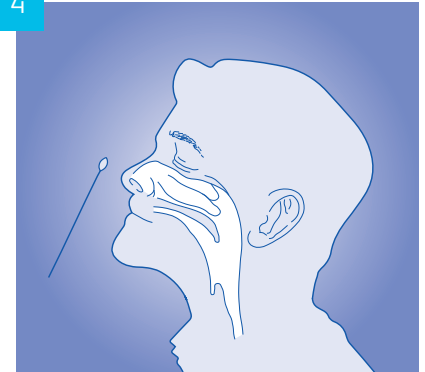

Retirar el hisopo de la cavidad nasal. La muestra ahora está lista para ser procesada usando el Kit del sistema BD Veritor para SARS-CoV-2.

LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER EN LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

- Recolectar la muestra lo antes posible después de la aparición de los síntomas.
- Procesar la muestra inmediatamente.
- Utilizar sólo los hisopos que se proporcionan con el kit.
- Consultar las directrices provisionales para la recolección, manipulación y análisis de muestras clínicas de personas para COVID-19 en <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html>



PARA LATINOAMÉRICA PÓNGASE EN CONTACTO
CON SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO DE BD

Argentina: 0800 444 5523

Brasil: 0800 771 7157

Chile: 22 482 7800

Colombia: 01 800 018 0173

México: 800 236 8324