



BD BBL Sensi-Disc

6- & 8-Place Self-Tamping Dispensers



8801511JAA(01)

2013-11

Türkçe

KULLANIM AMACI

Bu **Sensi-Disc** self-tamping dispenserlerde, **Sensi-Disc** duyarlılık testi diskleri veya **Taxo** anaerob ayrıştırma disklerinin 6 veya 8'li kartuşları bulunur. Bunlar disk duyarlılık testi gerçekleştirirken veya gram negatif anaerobik basillerin tahmini tanımlanmasında 100 mm tip Petri kutularına diskleri dağıtmak için kullanılmaktadır.¹⁻³

İŞLETME İLKELERİ

Dispenserin üzerindeki dağıtma pistonuna basarak diskler dağıtılır ve agar yüzeyine bastırıp sıkıştırılır.

Agar yüzeyi üzerinde dispenser tabanının yüksekliğini kontrol etmek için adım ayarlama halkası kullanılır.

Her dispenser, kullanılmadığında birimi nemden korumak için saklama kabı ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilir.

ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ

Bu dispenserler dikkatle üretilmiş ve iyice test edilmiştir. Doğru çalışma prosedürlerinin anlaşılması ve uygulanması ile sorunsuz performans sağlanır.

1. Dispenseri buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.
2. Dispenseri saklama kabından çıkarın ve çalışma yüzeyine yerleştirin.
3. Dispenserin yan tarafında bulunan, en uç noktada (yaklaşık 1,25 cm) **B-D** adını gösteren küçük siyah düğmeyi çekin ve düğmeyi aşağı kaydırın böylece yerine kilitlenecektir.
4. Kartuşları yerleştirin.
5. Siyah düğmeyi bırakın böylece dispenser kartuşları kilitleyecek şekilde orijinal konumuna geri dönecektir.
6. Dispenseri 100 mm plağa yerleştirin.
7. Ana dağıtma düğmesini çizginin altına kadar itin.
8. Dağıtma düğmesini asıl konumuna geri döndürün.
9. Ardından diskler kendiliğinden dağıtılacak ve besiyeri yüzeyine bastırılacaktır.

ÖZEL TALİMATLAR

Dispenser tekrar çalışmadan önce, her zaman tam bir döngüyü tamamlamalıdır. Eğer tam döngü tamamlanmamışsa veya dağıtıcı düğmeye basarken normalde karşılaşılandan daha fazla direnç gösteriyorsa, DURUN ve hemen Temizleme Prosedürünü uygulamaya başlayın.

TEMİZLEME PROSEDÜRÜ

1. Dispenserin yan tarafında bulunan küçük siyah düğmeyi en son noktaya kadar çekin ve düğmeyi aşağı kaydırın böylece yerine kilitletir.
2. Bütün kartuşları çıkarın.
3. Dispenseri kaldırın ve boş bir Petri kutusuna yerleştirin.
4. "Çalışma Prosedürleri" altında adım 6'ya kadar tarif edildiği gibi dispenser birkaç kez döngüye tabi tutun.
5. Kartuşları değiştirin.

Uyarılar ve Önlemler

In vitro Diyagnostik Kullanım içindir.

Tüm prosedürler boyunca mikrobiyolojik tehlikelere karşı uygun aseptik teknikleri ve belirlenen önlemleri uygulayın.

KARTUŞLAR

Her kartuştaki son disk "X" ile işaretlidir. "X" işaretli diskten sonra her kartuşa plastik bir parça eklenmiştir. Bu, kartuş boş olduğunda dispenserin çalışmasını önler. "X" işaretli disklerin görünümünü inceleyin ve hemen dolu kartuşları değiştirin.

Kartuşları dispensere yerleştirirken, ilk diskin kartuşun sonunda ortalandığından emin olun.

TEMİZLEME VE DEKONTAMİNASYON PROSEDÜRÜ

Kartuşlar her değiştirildiğinde veya sıkıştırıcı inoküle edilmiş agar yüzeyine temas ederek kontamine olduğunda, sıkıştırıcılar aşağıdaki prosedür takip edilerek dekontamine edilir.

1. Bütün kartuşları dispenserden çıkarın.
2. Boş 100 mm tip Petri kutusunu 20 – 25 mL %3 Lysol çözeltisi ile doldurun.
3. Boş 100 mm tip Petri kutusunu 20 – 25 mL %85 izopropil alkol çözeltisi ile doldurun.
4. İki boş 100 mm tip Petri kutusunu 20 – 25 mL steril saf su ile doldurun.
5. Dispenseri Lysol çözeltisi içeren kutuya yerleştirin.
6. Sıkıştırıcılar serbest kalana kadar dağıtma düğmesini itin. Düğmeyi basılı konumda 30 saniye tutun.
7. Adım 5 ve 6'yı izopropil alkol çözeltisi ile tekrarlayın.
8. Adım 5 ve 6'yı her bir saf su kabı ile tekrarlayın. Bu, temizlik ajanlarının tamamen giderilmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Sıkıştırıcılar şimdi temizlenmiş ve dekontamine edilmiştir. Sıkıştırıcılarda kalan alkol veya su buharlaşacaktır.

Birim saklanabilir veya test henüz tamamlanmamışsa, sıkıştırıcıları birkaç defa serbest bırakarak (düğmeye tam olarak basarak) kuruturken, birimi steril bir havlu, gazlı bez, swab veya başka bir steril absorban malzeme üzerine yerleştirin. Sıkıştırıcıları aynı

zamanda hava ile kurumaya da bırakılabilir fakat bu, dispenserin saklandığı bölgedeki sıcaklığa ve bağlı neme bağlı olarak ilave zaman gerektirecektir.

DİSPENSER VE SAKLAMA KABININ BAKIMI

1. İsteğe bağlı olarak, dispenser ve saklama kabı, su, izopropil alkol veya %3 Lysol çözeltisi ile silinebilir. Alkalın temizlik ajanlarını, organik çözücülerini veya aşındırıcı temizleyicileri kullanmayın. Temizledikten sonra, kartuşları yerleştirmeden önce birimi her zaman hava ile iyice kurutun.
2. Aşırı soğuk veya sıcak dispenser kullanmaktan kaçının. Kullanmadan önce her zaman oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Yüksek dispenser kullanımdan sonra olabildiğince çabuk buzdolabına koyun. Dondurucuda saklamayın.
3. Düşük nemli bir ortamı sürdürmek için dağıtıcı tabanına her bir dispenser ile birlikte paketlenmiş desikant kabı koyulması tavsiye edilir. Kabin en üstündeki izleme penceresinden görüldüğü gibi silis jeli pembeye döndüğünde desikantın yenilenmesi gerekir. Yenilemek için kabı, havalandırılan bir fırında 300 °F'de yaklaşık 3 saat veya koyu mavi renk tekrar oluşana kadar ısıtın. Soğuttuktan sonra, kap tekrar kullanılabilir ve nemi kapasitesinin sonuna kadar tekrar absorbe edebilecektir.

SERVİS VE BAKIM BİLGİLERİ

Temizleme Prosedürü veya Dekontaminasyon Prosedürü ile düzeltilemeyen herhangi bir arıza durumunda, talimatlar için ABD Teknik Servis telefonu, 800-638-8663.

Uluslararası bölgeler için, lütfen yerel BD temsilcinizle temasa geçin.

REFERANSLAR

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. Approved Standard: M2. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility test, CLSI, Wayne, Pa.
2. Jousimies-Somer, H.R., P.H. Summanen, and S.M. Finegold. 1999. *Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium*, and other anaerobic gram-negative rods and cocci, p. 690-711. In P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Tenover, and R.H. Tenover (ed.), Manual of clinical microbiology, 7th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
3. Summanen, P., E.J. Baron, D.M. Citron, C.A. Strong, H.M. Wexler, and S.M. Finegold. 1993. Wadsworth anaerobic bacteriology manual, 5th ed. Star Publishing Company, Belmont, Calif.



Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / Κατασκευαστής / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare / Производител / Producător / Üretici / Proizvođač / Производител / Аткарушы



Serial number / Sériové číslo / Løbenummer / Seriennummer / Seerianumber / Sarjanumero / Numéro de série / Seriennummer / Bestellnummer / Αριθμός σειράς / Sorozatszám / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové číslo / Número de catálogo / Каталоген номер / Număr de catalog / Katalog numarası / Kataloški broj / Номер по каталогу / Каталог нөмірі



Catalog number / Katalogové číslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Αριθμός καταλόγου / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové číslo / Número de catálogo / Каталоген номер / Număr de catalog / Katalog numarası / Kataloški broj / Номер по каталогу / Каталог нөмірі



Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C.E.E. / Autorisierte EG-Vertretung / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Hivatalos képviselő az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Jgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autoriseret representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU / Оторизиран представител в ЕС / Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл / Autorizuirani predstavnik u EU



In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnoosikalaste / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro. / In vitro diagnostikos prietais / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicinska pomůcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik / Медицински уред за диагностика ин витро / Aparatură medicală de diagnosticare in vitro / In Vitro Diagnostik Tibbi Cihaz / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Медицинский прибор для диагностики in vitro / Жасанды жағдайда жүргізілетін медициналық диагностика аспабы / Medicinska pomagala za In Vitro Dijagnostiku



Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d'emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zbacz instrukcja użytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen / Направете справка в инструкциите за употреба / Consultați instrucțiunile de utilizare / Kullanım Talimatları'na başvurun / Pogledajte uputstvo za upotrebu / См. руководство по эксплуатации / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / Koristi upute za upotrebu



Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, MD 21152 USA



Benex Limited
Pottery Road, Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland
Tel: +353-1-202-5222
Fax: +353-1-202-5388

Lysol is a trademark of Lehn and Fink Products, Division of Sterling Drug, Inc
BD, BD Logo, BBL, Sensi-Disc and Taxo are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD.