

BD Micro-Fine™+ Lanzetten

Komfort bei der Blutentnahme



Helping all people
live healthy lives



BD Micro-Fine™+ Lanzetten
0,20 mm Durchmesser (33G)

PZN 1392700 blau



BD Micro-Fine™+ Lanzetten
0,30 mm Durchmesser (30G)

PZN 8636507 grün


Hinweis zur Verordnung von Lanzetten:
Hilfsmittel-Nr. 21.9999.1000

BD Micro-Fine™ + Lanzetten passen auf die meisten Stechhilfen

BD Micro-Fine™ +
0,30 mm (30G) grün


BD Micro-Fine™ +
0,20 mm (33G) blau

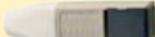


Stechhilfe	Hersteller/ Vertrieb	Stechhilfe	Hersteller/ Vertrieb
 BD Optimus™	BD	 AutoLancet®	Abbott MediSense
 Glucolet®	Bayer	 EasyTouch™	Abbott MediSense
 Microlet®	Bayer	 FreeStyle™	Abbott MediSense
 Omnilance®	B. Braun	 AutoLet® mini	Owen Mumford
 OneTouch® / Penlet®	LifeScan	 Glucoject Plus2	A. Menarini
 OneTouch® Mini-Stechhilfe	LifeScan	 Glucoject Dual®*	A. Menarini

* baugleich mit Owen Mumford Autolet® Impression Stechhilfe


Tipps für die Blutgewinnung an der Fingerbeere

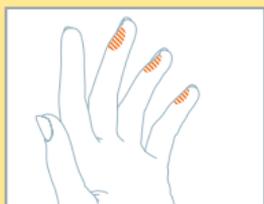


Wählen Sie zur Blutentnahme eine der beiden Außenseiten von Mittel-, Ring- oder kleinem Finger in Fingernagelhöhe, abwechselnd re./li. Hand.

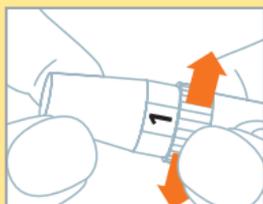

Wählen Sie eine möglichst geringe Einstichtiefe und eine möglichst dünne Lanzette (hohe „G“-Zahl).

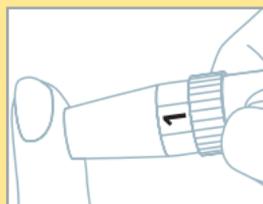

Drücken Sie die Stechhilfe gleichmäßig und leicht an. Verwenden Sie bei jeder Messung eine neue sterile Lanzette.

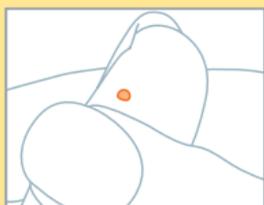

Drücken Sie den Finger sanft zusammen (nicht pressen), um einen Blutstropfen zu bilden.



BD Medical – Diabetes Care
Tel. +49 (0)6221 305555 (D)
Tel. +43 (0)1 763 660-13 (A)
www.bddiabetes.de