



Каталог продукции



Helping all people
live healthy lives

BD Diagnostics
Preanalytical Systems



Он-лайн ресурс, на котором вы можете найти информацию для ознакомления, оценки и внедрения передового опыта проведения преаналитического этапа лабораторных исследований в клинической медицине.

Информационный ресурс по преаналитическому этапу, спонсируемый BD

| | |
|---|----|
| Система BD Vacutainer® | 4 |
| Информация о пробирках BD Vacutainer® | 5 |
| Инструкция по использованию пробирок BD Vacutainer® | 6 |
| Маркировка пробирок BD Vacutainer® | 7 |
| Соответствующие обозначения | 8 |
| Обеспечение качества BD | 9 |
| Новые возможности | 10 |
| Спектр продукции | 11 |

Продукция

Взятие венозной крови

Пробирки

Биохимия

| | |
|---|----|
| Пробирки для сыворотки | 12 |
| Пробирки с разделительным гелем для сыворотки (BD SST™ II Advance) | 13 |
| Пробирки для ускоренного получения сыворотки с тромбином и гелем (BD RST) | 13 |
| Пробирки для плазмы (с гепарином) | 14 |
| Пробирки с разделительным гелем для плазмы (BD PST™ II) | 14 |
| Пробирки для исследования глюкозы | 15 |
| Пробирки для исследования следовых элементов | 15 |

Коагуляция

| | |
|---------------------------|----|
| Пробирки с цитратом | 16 |
| Пробирки со STAD | 16 |

Гематология

| | |
|---|----|
| Пробирки с ЭДТА | 17 |
| Пробирки для СОЭ | 18 |
| Пробирки для определения группы крови | 18 |

Специальные пробирки

| | |
|---|----|
| Пробирки с ACD, пробирки с ЭДТА и аprotинином, вторичные пробирки | 19 |
|---|----|

Молекулярная диагностика

| | |
|----------------------------|----|
| СРТ™, РРТ™, Paxgene™ | 20 |
|----------------------------|----|

Протеомика

| | |
|-------------------------------|----|
| Системы BD™ P100 & P700 | 21 |
| Пробирки BD™ P800 | 21 |

Иглы

| | |
|---|----|
| Безопасные иглы BD Vacutainer® Eclipse™ | 22 |
| Иглы для взятия крови BD Vacutainer® PrecisionGlide™ | 23 |
| Иглы с прозрачной камерой BD Vacutainer® Flashback | 23 |
| Комплекты для взятия крови BD Vacutainer® Push Button | 24 |
| Комплекты для взятия крови BD Vacutainer® Safety-Lok™ | 25 |

Аксессуары

Держатели

| | |
|--------------------|----|
| Одноразовые | 26 |
| Многоразовые | 26 |

Адаптеры

| | |
|---|----|
| Люер-адаптер, BD Luer-Lok™ адаптер, устройство для переноса крови | 26 |
| Жгуты | 27 |
| DIFF-SAFE® | 27 |

Взятие капиллярной крови

| | | |
|--------------------|---|----|
| Ланцеты | Контактно-активируемые ланцеты BD Microtainer® | 28 |
| | Ланцеты для взятия крови из пятки BD Microtainer® Quikheel™ | 28 |
| Гематология | Микропробирки BD Microtainer® MAP для автоматического анализа | 29 |
| | Микропробирки для гематологии BD Microtainer® | 29 |
| Биохимия | Микропробирки для сыворотки BD Microtainer® | 30 |
| | Микропробирки для сыворотки с разделительным гелем BD Microtainer® SST™ | 30 |
| Аксессуары | Адаптер-удлинитель пробирок BD Microtainer® | 30 |
| Биохимия | Микропробирки для плазмы BD Microtainer® (с гепарином) | 31 |
| | Микропробирки для плазмы с разделительным гелем BD Microtainer® PST™ | 31 |
| | Микропробирки для определения глюкозы BD Microtainer® | 31 |

Взятие артериальной крови

Анализ электролитов и газов

| | |
|-------------------------|----|
| Шприцы BD Preset™ | 32 |
| Шприцы BD A-Line™ | 32 |

Моча

Взятие мочи

Общий анализ мочи

| | |
|---|----|
| Пробирки для общего анализа мочи BD Vacutainer® | 33 |
|---|----|

Бактериологический анализ мочи

| | |
|--|----|
| Пробирки для бактериологического анализа мочи BD Vacutainer® | 33 |
|--|----|

Аксессуары

| | |
|--|----|
| Приспособления для взятия мочи BD™ | 34 |
|--|----|

Транспортировка

| | |
|--|----|
| Коробки для транспортировки Nemobox® 4 | 34 |
|--|----|

Указатель

| | |
|------------------------------------|----|
| Указатель каталожных номеров | 35 |
|------------------------------------|----|

Система BD Vacutainer®

Система для взятия крови BD Vacutainer® — закрытая вакуумная система, состоящая из стерильной двусторонней иглы для взятия крови с безопасным клапаном, одноразового держателя BD Vacutainer® и стерильных вакуумных пробирок BD Vacutainer® определенного объема. Большая часть пробирок для взятия крови BD Vacutainer® производится из чистого, безлатексного PET (Полиэтилентерефталата), который практически не бьется и представляет собой клинически протестированную, более безопасную альтернативу стеклу.*

* Plastic blood tubes improve safety. Wayman DJ. Plastics News, June 6, 1994:52 1

- 1 Безопасная игла для взятия нескольких проб крови BD Eclipse™ с защитным колпачком
- 2 Резиновый клапан для взятия нескольких проб
- 3 Одноразовый держатель BD Vacutainer®
- 4 Безопасная крышка BD Hemogard™
- 5 Стерильная вакуумная пробирка для взятия крови BD Vacutainer®



Визуально проверьте целостность стерильной наклейки на игле. Поверните и снимите белый колпачок



Вкрутите иглу в держатель до упора



Отклоните розовый защитный колпачок в сторону держателя. Поверните и снимите цветной колпачок



Проведите процедуру взятия крови



После того, как вынули иглу из вены, сразу же закройте иглу, накрутив защитный колпачок большим пальцем



Выбросьте иглу и держатель в контейнер для сбора острых предметов

Информация о пробирках BD Vacutainer®



BD Hemogard™

Пробирки для взятия крови BD Vacutainer® снабжены безлатексными крышками BD Hemogard™¹, состоящими из двух частей: внутренней резиновой пробки и наружного защитного колпачка. Крышка BD Hemogard™ предохраняет пользователя от контакта с кровью пациента, открывается удобнее, чем обычная резиновая пробка², и легко снимается при использовании автоматических систем.

Пробирки для взятия крови BD Vacutainer® можно закрывать повторно, используя вторичные крышки.

BD Microgard™

Крышка BD Microgard™ помогает защитить медработника от контакта с потенциально инфицированной кровью за счет специального механизма закрытия крышки, сокращающего риск разбрызгивания крови.

Размеры пробирок

Выпускаются пробирки BD Vacutainer® трех основных размеров, в каждом размере представлены пробирки нескольких объемов.

Некоторые пробирки могут быть представлены в других размерах. Для более подробной информации о зависимости размера пробирки от находящегося в ней реагента, см. соответствующий раздел.

13мм x 75мм

Реальный размер пробирки



1,8 мл
2 мл
2,5 мл
2,7 мл
3 мл
3,5 мл
4 мл
4,5 мл
5 мл

13мм x 100мм

Реальный размер пробирки



4 мл
4,5 мл
5 мл
6 мл
7 мл

16мм x 100мм

Реальный размер пробирки



6 мл
8 мл
8,5 мл
9,5 мл
10 мл

1. 1990 Победитель конкурса Общества Промышленного Дизайна Америки "Социально ответственный дизайн"

2. VS5713- Сравнительная оценка крышек BD Hemogard™ размером 16 мм в отношении защиты персонала от контакта с кровью и силы открывания крышки 09/99

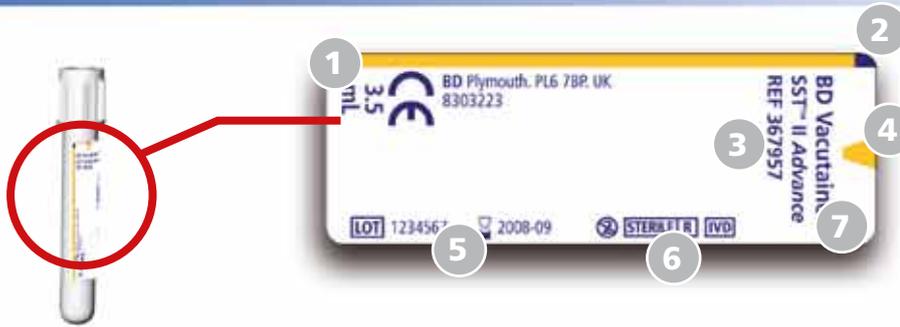
Инструкция по использованию пробирок BD Vacutainer®

| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЗЯТИЯ КРОВИ | ЦВЕТ | ТИП ПРОБИРКИ | ЧИСЛО ПЕРЕМЕШИВАНИЙ | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СВЕРТЫВАНИЯ | УСЛОВИЯ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ |
|---|---|--|---------------------|-------------------------------|---|
| Вторичные пробирки (если используются иглы-«бабочки») |  | Вторичные пробирки | - | - | - |
| Флаконы для гемокультивирования |  | Флаконы для гемокультивирования - аэробы | - | - | - |
| | | Флаконы для гемокультивирования - анаэробы | - | - | - |
| Цитрат |  | Пластиковые пробирки с цитратом натрия | 3-4 | - | 2000-2500 x g (ОЦС) 10-15 минут при 25°C ¹ |
| | | Стеклянные пробирки с цитратом натрия или СТАД | 3-4 | - | 1500 x g (ОЦС) 15 минут при 25°C ¹ |
| |  | Пробирки для СОЭ с цитратом натрия | 8-10 | - | - |
| |  | ACD | 8-10 | - | - |
| Сыворотка |  | Пробирки для сыворотки с кремнеземом без геля. Примечание: если используются стеклянные пробирки «без реагента», пожалуйста, собирайте в них кровь до пробирок с цитратом | 5-6 | 60 минут | ≤1300 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C ² |
| |  | BD SST™ II Advance (пробирки BD для сыворотки с разделительным гелем) | 5-6 | 30 минут | 1300-2000 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C |
| |  | BD RST (пробирки BD для ускоренного получения сыворотки) | 5-6 | 5 минут | 1500-2000 x g (ОЦС) ³ 10 минут при 23-27°C |
| Гепарин |  | Гепарин лития или гепарин натрия | 8-10 | - | ≤1300 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C |
| |  | BD PST™ II (пробирки BD для плазмы с разделительным гелем) | 8-10 | - | 1300-2000 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C |
| Гематология |  | ЭДТА | 8-10 | - | - |
| |  | Пробирки для определения группы крови Примечание: если используются пробирки для определения группы крови с активатором свертывания, пожалуйста, собирайте в них кровь после пробирок для сыворотки | 8-10 | - | - |
| РРТ |  | BD PPT™ пробирки с гелем и ЭДТА (Пробирки BD для отделения плазмы) | 8-10 | - | 1100-1500 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C |
| Глюкоза |  | Фторид натрия и Na2ЭДТА | 8-10 | - | ≤1300 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C |
| Следовые элементы |  | Следовые элементы Примечание: Если используются пробирки для следовых элементов с активатором свертывания, пожалуйста, собирайте в них кровь после пробирок для сыворотки | 8-10 | - | ≤1300 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C |
| Протеомика/ Молекулярная диагностика |  | BD CPT™ (Пробирки BD для выделения мононуклеаров) | 8-10 | - | 1500-1800 x g (ОЦС) 15-20 минут при 25°C |
| |  | BD™ P700 | 8-10 | - | 1100-1300 x g (ОЦС) 10 минут |
| |  | BD™ P800 | 8-10 | - | 1100-1300 x g (ОЦС) 10 или 20 минут для пробирок 2.0 и 8.5 мл соответственно |
| |  | BD™ P100 | 8-10 | - | 2000-3000 x g (ОЦС) 5 минут |
| |  | PAXgene™ | 8-10 | - | 10 минут при 3000-5000 x g (ОЦС) |

1. Пробирки с цитратом должны центрифугироваться со скоростью и в течение времени, необходимого для получения бедной тромбоцитами плазмы (концентрация тромбоцитов ≤10 000/мкл согласно рекомендациям CLSI)
2. Оставить на 60 минут до центрифугирования
3. Могут использоваться другие условия центрифугирования

Маркировка пробирок BD Vacutainer®

Пробирка



- 1 Объем собираемой крови
- 2 Индикатор заполнения пробирки
- 3 Каталожный номер BD
- 4 BD Vacutainer® Notch Label — маркер для правильного размещения вторичной этикетки
- 5 Дата окончания срока годности и номер партии
- 6 Знак стерильности
- 7 Тип пробирки и концентрация реагента (при его наличии)



Бумажная этикетка
Стандартная этикетка со свободным полем для размещения информации о пациенте и типе образца



Бумажная этикетка увеличенного размера (блоковая этикетка)
Этикетка увеличенного размера с различными полями для записи информации о пациенте и типе образца



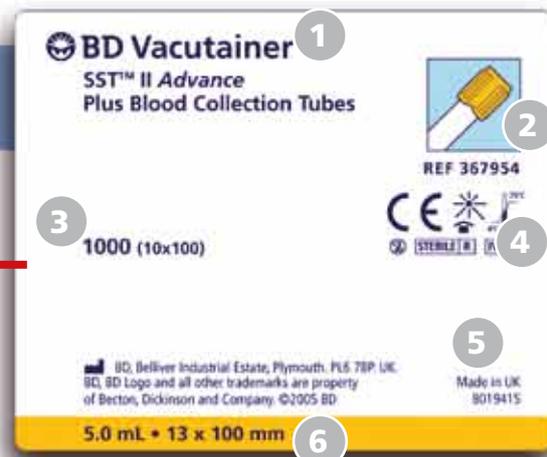
Прозрачная этикетка
Информация о продукции нанесена непосредственно на пробирку, маркировка пробирки вручную невозможна. Такой тип этикетки снижает риск застревания пробирок в штативах, особенно если на пробирки наклеивается несколько слоев этикеток, напечатанных в ЛПУ.

Упаковка



- 1 Тип пробирки и концентрация реагента (при его наличии)
- 2 Инструкция по использованию в картинках
- 3 Каталожный номер BD
- 4 Количество в упаковке
- 5 Дата окончания срока годности и номер партии
- 6 Соответствующие обозначения
- 7 Страна производства
- 8 Объем образца и размер пробирки

Транспортная коробка



- 1 Тип пробирки и концентрация реагента (при его наличии)
- 2 Каталожный номер BD
- 3 Количество в транспортной коробке
- 4 Соответствующие обозначения
- 5 Страна производства
- 6 Объем образца и размер пробирки

Соответствующие обозначения

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Знак CE, подтверждающий соответствие Европейской директиве IVD MD, 98/79/EC | | |
|  | Каталожный номер |  | Номер партии |
|  | Использовать до |  | Использовать только 1 раз или не использовать повторно |
|  | Стерилизовано автоклавированием |  | Стерилизовано радиацией |
|  | Перед использованием прочтите инструкцию |  | Стерилизовано оксидом этилена |
|  | Беречь от солнечных лучей (может быть указан предел температур) |  | Беречь от источников света |
|  | Хрупкое |  | Температура хранения |
|  | Вверх |  | Возможна вторичная переработка |
|  | Дата производства |  | Номер серии |
|  | Медицинские приспособления для диагностики In Vitro | | |

| | |
|------------------------|---|
| K2E | К2ЭДТА |
| K3E | К3ЭДТА |
| N2E | Na2ЭДТА |
| 9NC | Цитрат натрия 9:1 |
| 4NC | Цитрат натрия 4:1 |
| FE | Фторид/ЭДТА |
| LH | Гепарин лития |
| NH | Гепарин натрия |
| Z | Без реагента |
| SST™ II Advance | Кремнезем (Активатор свертывания) / Гель |
| CTAD | Буферный раствор цитрата 0.109M |
| RST | Активатор свертывания на основе тромбина/гель |
| ACD-A | ACD раствор А |
| ACD-B | ACD раствор В |
| LH PST™ II | Гепарин лития и гель |
| NC FicolI | Цитрат натрия/фиколл |
| NH FicolI | Гепарин натрия/фиколл |

Соответствие продукции

Пробирки для взятия крови BD Vacutainer® и дополнительные приспособления (кроме перечисленных в следующем абзаце) относятся к медицинским приспособлениям для диагностики *in vitro*. Они соответствуют требованиям, предъявляемым Европейской директивой по медицинским приспособлениям для диагностики *in vitro* 98/79/ЕС.

Иглы для взятия крови BD PrecisionGlide™, комплекты для взятия крови BD Vacutainer® и Шприцы для взятия артериальной крови с иглами относятся (класс IIa) к медицинским приспособлениям и, таким образом, соответствуют требованиям Европейской директивы по медицинским приспособлениям, 93/42/ЕЕС. Все этикетки, размещенные на продукции, имеют CE маркировку, так же как и этикетки на упаковках, что свидетельствует о соответствии вышеупомянутым директивам. Аксессуары не относятся к медицинским приспособлениям для диагностики *in vitro*, поэтому не должны соответствовать вышеупомянутым директивам.

Завод по производству продукции BD, расположенный в Великобритании, поставляющий большую часть продукции для европейского рынка, сертифицирован по ISO 13485:2003 и ISO 14001:2004. Так как продукция завода поставляется также и на рынок США, завод соответствует требованиям FDA и имеет регистрационное свидетельство FDA. Копии всех этих свидетельств могут быть предоставлены по запросу.

Другие заводы-изготовители BD также сертифицированы, и по запросу могут предоставить регистрационные свидетельства.

Вся продукция разработана и произведена в соответствии с соответствующими международными и европейскими стандартами, среди которых ISO 6710, EN14820 (для пробирок для взятия крови), ISO 6009 (для игл для взятия крови), EN 980 (для символов, используемых при маркировке продукции).

Срок годности продукта основан на данных тестирования стабильности и отличается для разных продуктов. Срок годности указан на этикетке продукции, окончанием срока годности является последний день месяца, указанного на этикетке.

Клинические Данные

Перед тем, как выпустить на рынок новую продукцию, BD проводит обширные клинические исследования, результаты которых могут быть предоставлены по запросу.

Стерилизация продукции

Все продукты стерилизуются, с использованием либо гамма-излучения в соответствии с ANSI/AAM/ISO 11137-1995 «Стерилизация продукции для Здравоохранения (Требования для Валидации и Стандартного Контроля — Радиационная Стерилизация)», либо оксида этилена (EtO) в соответствии с ISO 11135-1994 «Валидация и Стандартный Контроль Стерилизации Оксидом этилена», либо автоклавированием в соответствии с EN554: 1994 «Стерилизация Медицинских устройств — Валидация и Стандартный Контроль Стерилизации автоклавированием». Постоянно проводится микробиологическая экспертиза для оценки эффективности стерилизации.

Все приспособления BD Vacutainer® для диагностики *in vitro* и прочие медицинские приспособления стерилизуются до уровня стерильности 10^{-6} , в соответствии с EN 556: 1995 — Требования для стерилизованных устройств, которые будут маркированы «СТЕРИЛЬНО».

BD и Окружающая среда

Культура компании крепко связана с нашей глобальной стратегией — и с нашей целью «Помогать всем людям жить здоровой жизнью».

Признавая, что здоровье человека и здоровая окружающая среда неотделимы, BD уделяет особое внимание ответственному отношению к экологии. Мы разрабатываем, производим и распространяем безопасную и высокоэффективную медицинскую продукцию, одновременно снижая воздействие на окружающую среду. Мы стремимся сохранить энергию, воду, и другие природные ресурсы и свести к минимуму количество отходов от наших производств и административной деятельности. При производстве нашей продукции мы уделяем особое внимание возможностям повторного использования и возобновления ресурсов. Каждый год BD собирает данные и выпускает отчет об экологической обстановке, отчет является доступным по запросу.

Техническая информация по продукции (TIS) для каждой пробирки доступна по запросу.

Продукция BD Vacutainer®, BD Microtainer®, BD™ зарегистрирована и сертифицирована в РФ и на территории государств СНГ. Пробирки BD Vacutainer® сертифицированы по ГОСТ Р ИСО 6710.

Все сертификаты и регистрационные удостоверения могут быть предоставлены по запросу.



Британский институт стандартов (BSI) – Свидетельство о регистрации в соответствии с ISO 13485: 2003



BSI – Система Защиты окружающей среды – Свидетельство о регистрации в соответствии с ISO 14001: 2004



BSI – ЕС Сертификат CV00362 (действует с ноября 2009)

BD Microtainer® MAP (Микропробирки для автоматического анализа)

BD Microtainer® MAP — это однокомпонентные, совместимые с автоматическими гематологическими анализаторами микропробирки, разработанные специально для того, чтобы вы могли сконцентрироваться на пациенте. Их инновационный дизайн поможет повысить эффективность рабочего процесса за счет совместимости со стандартными штативами большинства используемых анализаторов. Удобная в использовании однокомпонентная пробирка размером 13x75мм избавляет от необходимости собирать или утилизировать дополнительные части, а полноразмерная, стандартная этикетка помогает избежать риска возникновения ошибок при маркировке пробирок. Более подробную информацию и каталожный номер вы найдете на странице 29.

Для получения дополнительной информации об этих продуктах и услугах, пожалуйста, свяжитесь со своим представителем BD.





Пробирки (страницы 12-21)

Отдел преаналитических систем компании BD – пионер и лидер в производстве систем для взятия крови. Пробирки для взятия крови BD Vacutainer® соответствуют требованиям международного стандарта ISO 6710, российского ГОСТ Р ИСО 6710, а также международного стандарта CLSI H1-A5 Vol.23 № 33. Для того, чтобы сделать рабочий процесс более удобным, BD предлагает различные цвета крышек для пробирок для взятия крови.



Иглы (страницы 22-25)

BD – ведущий поставщик специально разработанных безопасных продуктов для взятия крови при помощи вакуумных систем, включающих в себя комплекты для взятия крови BD Vacutainer® Safety-Lok™ и комплекты для взятия крови BD Vacutainer® Push Button, единственные приспособления для взятия крови с системой автоматического извлечения иглы из вены для эффективного снижения риска уколов. В линейке продукции BD Vacutainer® есть также иглы для взятия крови разного диаметра и длины, в том числе и иглы с защитным колпачком BD Vacutainer® Eclipse™.



Аксессуары (страницы 26-27)

В дополнение к иглам и пробиркам BD Vacutainer®, BD предлагает широкий выбор различных дополнительных приспособлений, в том числе держатели, адаптеры и жгуты, обеспечивающие удобство и безопасность процедуры взятия крови.



Ланцеты (страница 28)

BD предлагает широкий спектр безопасных ланцетов для взятия капиллярной крови, сочетающих удобство использования и определенную глубину прокола. Контактно-активируемые ланцеты BD Microtainer® с эргономичным дизайном и ланцеты BD Quikheel™, разработанные для взятия крови из пятки у доношенных и недоношенных новорожденных и детей до 1 года.



Пробирки для капиллярной крови (страницы 29-31)

Пробирки для капиллярной крови BD Microtainer® делают удобным процесс взятия крови и гарантируют получение качественного образца. Предлагаемые пробирки BD Microtainer® для применения в гематологических и различных биохимических исследованиях имеют четкие линии заполнения и цветовую кодировку крышек, совпадающую с таковой у пробирок BD Vacutainer®, что облегчает идентификацию образцов.



Шприцы для артериальной крови (страница 32)

Шприцы для артериальной крови BD могут использоваться как для исследования газов артериальной крови, так и для прочих тестов, необходимых при обследовании пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Шприцы разработаны для того, чтобы снизить риск возникновения преаналитических ошибок при взятии, транспортировке и обработке образцов. Шприцы содержат сбалансированный кальцием гепарин лития, что помогает получить более точные результаты тестов и снизить риск образования сгустков в пробе.



Продукция для взятия мочи (страницы 33-34)

Продукция для взятия мочи BD предлагает стандартную закрытую систему взятия и транспортировки образцов. Система обеспечивает безопасность как для пациента, так и для медработника, за счет сохранения целостности образца. Это простое и стандартизованное решение для взятия, транспортировки и подготовки образца для проведения диагностических процедур.

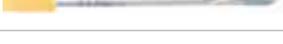
Пробирки для сыворотки BD Vacutainer®

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Активатор свертывания (кремнезем) распылен на стенки пробирок
- Используются для получения сыворотки
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: $\leq 1300 \times g$ (ОЦС) 10 минут при 25°C

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------|------------|--------------|--------------------|
|  | 368492 | 2 | 13x75 | Активатор свертывания | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Красная прозрачная |
|  | 369032 | 4 | 13x75 | Активатор свертывания | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Красная |
|  | 368815 | 6 | 13x100 | Активатор свертывания | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Красная |
|  | 367896 | 10 | 16x100 | Активатор свертывания | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Красная |
|  | 368271 | 2 | 13x75 | Активатор свертывания | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Красная прозрачная |
|  | 365904 | 4 | 13x75 | Активатор свертывания | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Красная |
|  | 367819 | 6 | 13x100 | Активатор свертывания | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Красная |

Пробирки с разделительным гелем для сыворотки BD Vacutainer® (BD Vacutainer® SST™ II Advance)

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат разделительный гель на основе акрила, активатор свертывания распылен на стенки пробирок
- Используются для получения сыворотки и отделения ее от сгустка
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: 1300-2000 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------|
|  | 366882 | 2.5 | 13x75 | Активатор свертывания | Пластик | Бумажная увеличенного размера | BD Hemogard™ | Желтая |
|  | 367957 | 3.5 | 13x75 | Активатор свертывания | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Желтая |
|  | 367955 | 5 | 13x100 | Активатор свертывания | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Желтая |
|  | 367953 | 8.5 | 16x100 | Активатор свертывания | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Желтая |
|  | 368498 | 3.5 | 13x75 | Активатор свертывания | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Желтая |
|  | 368879 | 4 | 13x100 | Активатор свертывания | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Желтая |
|  | 366566 | 5 | 13x100 | Активатор свертывания | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Желтая |
|  | 366644 | 8.5 | 16x100 | Активатор свертывания | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Желтая |

Пробирки для ускоренного получения сыворотки с тромбином и гелем BD Vacutainer® (BD Vacutainer® RST)

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат активатор образования сгустка на основе тромбина и разделительный гель
- Используются для получения сыворотки
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: 1500-2000 x g (ОЦС) 10 минут при 23-27°C

НОВИНКА

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|---------|----------|----------|--------------|-------------|
|  | 368774 | 5 | 13x100 | Тромбин | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Оранжевая |

Пробирки для плазмы BD Vacutainer® (С гепарином)

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат распыленный на стенки гепарин лития или гепарин натрия (17МЕ/мл)
- Используются для получения плазмы
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: ≤1300 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------------|
|  | 368494 | 2 | 13x75 | Гепарин лития | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Зеленая прозрачная |
|  | 368884 | 4 | 13x75 | Гепарин лития | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Зеленая |
|  | 368886 | 6 | 13X100 | Гепарин лития | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Зеленая |
|  | 367526 | 10 | 16X100 | Гепарин лития | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Зеленая |
|  | 368272 | 2 | 13x75 | Гепарин лития | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Зеленая прозрачная |
|  | 368496 | 4 | 13x75 | Гепарин лития | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Зеленая |
|  | 368889 | 6 | 13X100 | Гепарин лития | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Зеленая |
|  | 367869 | 4 | 13x75 | Гепарин натрия | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Зеленая |
|  | 367876 | 6 | 13X100 | Гепарин натрия | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Зеленая |

Пробирки с разделительным гелем для плазмы BD Vacutainer® (BD Vacutainer® PST™ II)

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат инертный полимерный гель и гепарин лития (17 МЕ / мл крови)
- Используются для получения плазмы и отделения ее от клеток
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: 1300-2000 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|----------------|
|  | 367374 | 3 | 13x75 | Гепарин лития | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Светло-зеленая |
|  | 367376 | 4.5 | 13x100 | Гепарин лития | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Светло-зеленая |
|  | 367378 | 8 | 16X100 | Гепарин лития | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Светло-зеленая |
|  | 368497 | 3 | 13X75 | Гепарин лития | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Светло-зеленая |
|  | 366567 | 4.5 | 13X100 | Гепарин лития | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Светло-зеленая |

Пробирки BD Vacutainer® для исследования глюкозы

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат фторид натрия и ЭДТА
- Используются для получения образцов плазмы, в которых стабилизирована концентрация глюкозы
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: $\leq 1300 \times g$ (ОЦС) 10 минут при 25°C

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------------|----------|------------|--------------|------------------|
|  | 368520 | 2 | 13x75 | Фторид натрия, Na2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Серая прозрачная |
|  | 368521 | 4 | 13x75 | Фторид натрия, Na2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Серая |
|  | 367933 | 2 | 13x75 | Фторид натрия, Na2ЭДТА | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Серая прозрачная |

Пробирки BD Vacutainer® для исследования следовых элементов

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат активатор свертывания, ЭДТА или гепарин натрия
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: $\leq 1300 \times g$ (ОЦС) 10 минут при 25°C

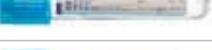
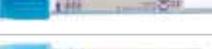
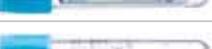
| | |
|--------------------------|--------------------|
| Свинец 0.3 | Хром 0.5 Селен 0.6 |
| Мышьяк 0.2 Магний* 40 | Медь 5.0 Цинк* 40 |
| Кадмий 0.1 Марганец 1.5 | Железо 25 |
| Кальций* 150 Ртуть** 3.0 | |

Анализ проводился * – пламенной фотометрией,
** – выпариванием, остальные – атомно-абсорбционной спектрофотометрией

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------|----------|--------------|-------------|
|  | 368380 | 6 | 13X100 | Активатор свертывания | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Темно-синяя |
|  | 368381 | 6 | 13X100 | K2EDTA | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Темно-синяя |
|  | 367735 | 7 | 13X100 | Гепарин | Стекло | Бумажная | BD Hemogard™ | Темно-синяя |

Пробирки BD Vacutainer® с цитратом

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат буферный раствор цитрата натрия (соотношение кровь:цитрат 9:1)
- Сделаны из пластика (полиэтилентерефталат/полипропилен) или стекла
- Используются для получения образца цитратной плазмы
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: 2000-2500 x g (ОЦС) 10-15 минут при 25°C

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|--------------------|
|  | 363047 | 1.8 | 13x75 | 0.109М, 3.2% | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Голубая прозрачная |
|  | 363048 | 2.7 | 13x75 | 0.109М, 3.2% | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Голубая |
|  | 368273 | 1.8 | 13x75 | 0.109М, 3.2% | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Голубая прозрачная |
|  | 364305 | 2.7 | 13x75 | 0.109М, 3.2% | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Голубая |
|  | 363097 | 1.8 | 13x75 | 0.129М, 3.8% | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Голубая прозрачная |
|  | 363079 | 2.7 | 13x75 | 0.129М, 3.8% | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Голубая |
|  | 367714 | 4.5 | 13x75 | 0.105М, 3.2% | Стекло | Бумажная | BD Hemogard™ | Голубая |
|  | 366575 | 6,0 | 13x100 | 0.105М, 3.2% | Стекло | Бумажная | BD Hemogard™ | Голубая |
|  | 367704 | 4.5 | 13x75 | 0.129М, 3.8% | Стекло | Бумажная | BD Hemogard™ | Голубая |
|  | 366646 | 4.5 | 13x75 | 0.129М, 3.8% | Стекло | Прозрачная | BD Hemogard™ | Голубая |

Пробирки BD Vacutainer® со СТАД

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат буферный раствор Цитрата, Теофилина, Аденозина и Дипиридамола
- Используются для получения образцов плазмы, в которых стабилизирована активность гепарина in vitro
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: 1500 x g (ОЦС) 15 минут при 25°C

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|
|  | 367562 | 2.7 | 13x75 | 0.109М, 3.2% | Стекло | Бумажная | BD Hemogard™ | Голубая |
|  | 367599 | 4.5 | 13x75 | 0.109М, 3.2% | Стекло | Бумажная | BD Hemogard™ | Голубая |

Пробирки BD Vacutainer® с ЭДТА

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат К2ЭДТА или К3ЭДТА
- Используются для получения цельной крови или плазмы с ЭДТА
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: не требуется

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|---------|----------|-------------------------------|--------------|----------------------|
|  | 368841 | 2 | 13x75 | К2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Прозрачная сиреневая |
|  | 368856 | 3 | 13x75 | К2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Прозрачная сиреневая |
|  | 368861 | 4 | 13x75 | К2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Сиреневая |
|  | 367864 | 6 | 13X100 | К2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Сиреневая |
|  | 367525 | 10 | 16X100 | К2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Сиреневая |
|  | 368274 | 2 | 13x75 | К2ЭДТА | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Прозрачная сиреневая |
|  | 368499 | 3 | 13x75 | К2ЭДТА | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Прозрачная сиреневая |
|  | 367862 | 4 | 13x75 | К2ЭДТА | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Сиреневая |
|  | 365900 | 6 | 13X100 | К2EDTA | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Сиреневая |
|  | 367839 | 4 | 13x75 | К2EDTA | Пластик | Бумажная увеличенного размера | BD Hemogard™ | Сиреневая |
|  | 367836 | 2 | 13x75 | К3EDTA | Пластик | Бумажная увеличенного размера | BD Hemogard™ | Прозрачная сиреневая |
|  | 368857 | 3 | 13x75 | К3EDTA | Пластик | Бумажная увеличенного размера | BD Hemogard™ | Прозрачная сиреневая |
|  | 368860 | 4 | 13x75 | К3EDTA | Пластик | Бумажная увеличенного размера | BD Hemogard™ | Сиреневая |
|  | 367858 | 2 | 13x75 | К3EDTA | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Прозрачная сиреневая |
|  | 368270 | 4 | 13x75 | К3EDTA | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Сиреневая |

Пробирки для СОЭ BD Vacutainer®

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат буферный раствор цитрата натрия (соотношение кровь:цитрат 4:1)
- Используются для получения пробы цельной крови для определения СОЭ
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: не требуется

| Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|------------------|------------------|-------------|---------|----------|----------|------------|-------------|
|------------------|------------------|-------------|---------|----------|----------|------------|-------------|

Стекланные пробирки BD Vacutainer® для определения СОЭ в штативах BD Seditainer™

| | | | | | | | | |
|--|--------|---|-----------|------------------------|--------|----------|--------------|--------|
|  | 366674 | 5 | 10.25x120 | Цитрат натрия (0.105M) | Стекло | Бумажная | BD Hemogard™ | Черная |
|--|--------|---|-----------|------------------------|--------|----------|--------------|--------|

Стекланные пробирки BD Vacutainer® для определения СОЭ на анализаторе BD Sedi-15™

| | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-------|------------------------|--------|----------|------------------|--------|
|  | 366676 | 1.8 | 8x100 | Цитрат натрия (0.105M) | Стекло | Бумажная | Резиновая пробка | Черная |
|---|--------|-----|-------|------------------------|--------|----------|------------------|--------|

Пробирки для определения группы крови BD Vacutainer®

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат К2ЭДТА или кремнезем (активатор свертывания), с этикеткой
- Используются для получения образца сыворотки, цельной крови или плазмы с ЭДТА
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: не требуется

| Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|------------------|------------------|-------------|---------|----------|----------|------------|-------------|
|------------------|------------------|-------------|---------|----------|----------|------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--------------|---------|
|  | 366164 | 4 | 13x75 | К2ЭДТА | Пластик | Бумажная увеличенного размера | BD Hemogard™ | Розовая |
|  | 367941 | 6 | 13X100 | К2ЭДТА | Пластик | Бумажная увеличенного размера | BD Hemogard™ | Розовая |
|  | 368817 | 6 | 13X100 | Кремнезем (активатор свертывания) | Пластик | Бумажная увеличенного размера | BD Hemogard™ | Розовая |

Пробирки BD Vacutainer® с ACD

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат – Раствор ACD – А: (Тринатрия цитрат (2.59 мг/мл), лимонная кислота (0.94 мг/мл), декстроза (2.88 мг/мл), сорбат калия (0.024 мг/мл)
- Раствор ACD – В: (Тринатрия цитрат (2.20 мг/мл), лимонная кислота (0.80 мг/мл), декстроза (2.45 мг/мл), сорбат калия (0.033 мг/мл)
- Используются для получения образца цельной крови или плазмы
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: не требуется

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|----------------|
|  | 367756 | 6 | 13X100 | Раствор ACD-B | Стекло | Бумажная | BD Hemogard™ | Лимонно-желтая |
|  | 366645 | 8.5 | 16X100 | Раствор ACD-A | Стекло | Бумажная | Резиновая пробка | Лимонно-желтая |

Пробирки BD Vacutainer® с ЭДТА и аprotинином

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат КЗЭДТА (1.6 мг на 1 мл крови) и ингибитор протеаз аprotинин (50КМЕ на 1 мл крови)
- Используются для получения образца плазмы с ЭДТА
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------|--------------|-------------|
|  | 361017 | 5 | 13x75 | КЗЭДТА/ Апротинин | Стекло | Бумажная | BD Hemogard™ | Розовая |

Пластиковые вторичные вакуумные пробирки BD Vacutainer® (EST)

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Используются как вторичные пробирки/пробирки для аликвотирования
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: не требуется

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|-------------|
|  | 362725 | 3 | 13X75 | Без реагента | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Прозрачная |

Взятие венозной крови

Пробирки

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Пробирки для отделения плазмы BD Vacutainer® PPT™

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат распыленный на стенки и высушенный К2ЭДТА в качестве антикоагулянта и инертный полиэстерный гель
- Используются для получения образца неразведенной плазмы
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: 1100-1500 x g (ОЦС) 10 минут при 25°C

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|----------|------------|--------------|----------------|
|  | 362791 | 5 | 13x100 | К2ЭДТА/Гель | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Жемчужно-белая |
|  | 362795 | 5 | 13x100 | К2ЭДТА/Гель | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Жемчужно-белая |
|  | 362799 | 8.5 | 16x100 | К2ЭДТА/Гель | Пластик | Прозрачная | BD Hemogard™ | Жемчужно-белая |

Пробирки для выделения мононуклеаров BD Vacutainer® CPT™

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат антикоагулянт (Цитрат натрия или гепарин натрия), и разделительную систему гель/Фиколл™*, стенки пробирок покрыты силиконом для минимизации неспецифической активации клеток
- Используются для выделения мононуклеаров из цельной крови в один этап
- Упаковка: 60
- Условия центрифугирования: 1500-1800 x g (ОЦС) 15-20 минут при 25°C

* FICOLL™ – торговая марка компании GE Healthcare

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------|
|  | 362781 | 4 | 13x100 | Цитрат натрия/Фиколл™ | Стеклянная | Прозрачная | Резиновая | Черно-синяя |
|  | 362782 | 8 | 16x125 | Цитрат натрия/Фиколл™ | Стеклянная | Прозрачная | Резиновая | Черно-синяя |
|  | 362780 | 8 | 16x125 | Гепарин натрия/Фиколл™ | Стеклянная | Прозрачная | Резиновая | Красно-зеленая |

Пробирки для выделения РНК человека PAXgene™*

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат реагент, моментально стабилизирующий внутриклеточную РНК на 3 дня при комнатной температуре и на 5 дней при температуре 4°C
- Должен использоваться вместе с набором для выделения РНК PAXgene™ Blood RNA Kit. Наборы PAXgene™ Kits можно приобрести в компании Qiagen www.qiagen.com
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000
- Условия центрифугирования: 10 минут при 3000–5000 x g (ОЦС)

* PAXgene™ — торговая марка PreAnalytiX GmbH.

| | Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|----------|----------|--------------|-------------------------------------|
|  | 762165 | 2.5 | 16x100 | Стабилизатор РНК | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Прозрачная/красная резиновая пробка |

BD™ P100 Система взятия крови для стабилизации белков плазмы

Набор BD™ P100 для взятия крови содержит:

- 24 пробирки для взятия крови BD™ P100: шесть (6) пробирок в упаковке из фольги, четыре (4) упаковки в наборе
- Инструкция по применению
- Только для исследовательских целей — не применять для диагностики
- Условия центрифугирования: 2000-3000 x g (ОЦС) 5 минут



| Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|------------------|------------------|-------------|---------|----------|----------|--------------|-------------------------------------|
| 366456 | 8.5 | 16X100 | K2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Прозрачная/красная резиновая пробка |

BD™ P700 система взятия крови для хранения GLP-1 в плазме

Система BD™ P700 содержит:

- 20 пробирок для взятия крови BD™ P700 для базовых метаболических исследований: 10 пробирок в упаковке из фольги, 2 упаковки в наборе
- Пробирки содержат коктейль ингибиторов протеолитической дипептил пептидазы IV (DPP-IVV)
- Только для исследовательских целей — не применять для диагностики
- Условия центрифугирования: 1100-1300 x g (ОЦС) 10 минут



| Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|------------------|------------------|-------------|---------|----------|----------|--------------|---|
| 366473 | 3 | 13x75 | K2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Прозрачная сиреневая/темно-серая резиновая пробка |

Пробирки BD™ P800

- Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови
- Содержат коктейль ингибиторов протеаз, эстераз и дипептил пептидазы IV (DPP-IV)
- Только для исследовательских целей — не применять для диагностики
- В упаковке: 100
- Условия центрифугирования: 1100-1300 x g (ОЦС) 10 и 20 минут соответственно для пробирок 2.0 и 8.5 мл

| Каталожный номер | Объем крови (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|--|------------------|-------------|---------|----------|----------|--------------|-------------|
|  366420 | 2 | 13X75 | K2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Прозрачная |
|  366421 | 8.5 | 16X100 | K2ЭДТА | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Прозрачная |

Безопасные иглы BD Vacutainer® Eclipse™

- Стерильные, одноразовые
- Безопасные иглы для взятия нескольких проб крови
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 48/480

| | Каталожный номер | Размер | Длина | Дополнительные приспособления | Цвет |
|---|------------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------|
|  | 368609 | 21G (0.8 мм) | 1.25" (32 мм) | | Зеленый |
|  | 368610 | 22G (0.7 мм) | 1.25" (32 мм) | | Черный |

Безопасные иглы BD Vacutainer® Eclipse™ с присоединенным держателем

- Стерильные, одноразовые
- Безопасные иглы для взятия нескольких проб крови с присоединенным держателем
- Упаковка: 100

| | Каталожный номер | Размер | Длина | Дополнительные приспособления | Цвет |
|---|------------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------|
|  | 368650 | 21G (0.8 мм) | 1.25" (32 мм) | Присоединенный держатель | Зеленый |
|  | 368651 | 22G (0.7 мм) | 1.25" (32 мм) | Присоединенный держатель | Черный |

Иглы для взятия крови с прозрачной камерой BD Vacutainer® Flashback

- Стерильные, одноразовые
- Иглы для взятия нескольких проб крови
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/1000

| | Каталожный номер | Размер | Длина | Цвет |
|---|------------------|--------------|---------------|---------|
|  | 301746 | 21G (0.8 мм) | 1" (25 мм) | Зеленый |
|  | 301747 | 22G (0.7 мм) | 1" (25 мм) | Черный |
|  | 301748 | 22G (0.7 мм) | 1.25" (32 мм) | Черный |

Иглы для взятия нескольких проб крови BD Vacutainer® PrecisionGlide™

- Стерильные, одноразовые
- Иглы для взятия нескольких проб крови
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000

| | Каталожный номер | Размер | Длина | Цвет |
|---|------------------|--------------|--------------|--------|
|  | 360214 | 20G (0.9 мм) | 1" (25 мм) | Желтый |
|  | 360215 | 20G (0.9 мм) | 1.5" (38 мм) | Желтый |

Иглы для взятия одной пробы крови BD Vacutainer® PrecisionGlide™

- Стерильные, одноразовые
- Иглы для взятия одной пробы крови в ветеринарии
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000

| | Каталожный номер | Размер | Длина | Цвет |
|---|------------------|------------|--------------|---------|
|  | 360747 | 18G (1 мм) | 1" (25 мм) | Розовый |
|  | 360748 | 18G (1 мм) | 1.5" (38 мм) | Розовый |

Взятие венозной крови

Иглы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплекты для взятия крови BD Vacutainer® Push Button

- Стерильные, одноразовые
- Стерильная закрытая система для взятия крови из сложных вен
- Доступны как с люер-адаптером, так и без него
- Доступны иглы нескольких размеров и с разной длиной катетера
- Активация безопасного механизма, когда игла еще находится в вене
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/200

Каталожный номер

Размер

Длина иглы

Длина катетера

Дополнительные приспособления

Цвет

С Люер-адаптером

| | | | | | | |
|--|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|
|  | 367338 | 21G (0.8 мм) | 0.75" (19 мм) | 7" (178 мм) | Люер-адаптер | Зеленый |
|  | 367344 | 21G (0.8 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Люер-адаптер | Зеленый |
|  | 367336 | 23G (0.6 мм) | 0.75" (19 мм) | 7" (178 мм) | Люер-адаптер | Голубой |
|  | 367342 | 23G (0.6 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Люер-адаптер | Голубой |
|  | 367335 | 25G (0.5 мм) | 0.75" (19 мм) | 7" (178 мм) | Люер-адаптер | Синий |
|  | 367341 | 25G (0.5 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Люер-адаптер | Синий |

Без Люер-адаптера

| | | | | | | |
|--|--------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---------|
|  | 367326 | 21G (0.8 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Без люер-адаптера | Зеленый |
|  | 367324 | 23G (0.6 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Без люер-адаптера | Голубой |
|  | 367323 | 25G (0.5 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Без люер-адаптера | Синий |

Комплект для взятия крови BD Vacutainer® Safety-Lok™

- Стерильные, одноразовые
- Стерильная закрытая система для взятия крови из сложных вен
- Доступны как с люер-адаптером, так и без него, есть комплекты с присоединенным держателем
- Также могут использоваться для кратковременных инфузий — максимум 2 часа
- Доступны иглы нескольких размеров и с разной длиной катетера
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/200, 25/200 для комплектов BD Vacutainer® Safety-Lok™ с присоединенным держателем

| Каталожный номер | Размер | Длина иглы | Длина катетера | Дополнительные приспособления | Цвет |
|------------------|--------|------------|----------------|-------------------------------|------|
|------------------|--------|------------|----------------|-------------------------------|------|

С Люер-адаптером

| | | | | | | |
|--|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|
|  | 367282 | 21G (0.8 мм) | 0.75" (19 мм) | 7" (178 мм) | Люер-адаптер | Зеленый |
|  | 367286 | 21G (0.8 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Люер-адаптер | Зеленый |
|  | 367284 | 23G (0.6 мм) | 0.75" (19 мм) | 7" (178 мм) | Люер-адаптер | Голубой |
|  | 367288 | 23G (0.6 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Люер-адаптер | Голубой |
|  | 367295 | 25G (0.5 мм) | 0.75" (19 мм) | 7" (178 мм) | Люер-адаптер | Синий |

С присоединенным держателем

| | | | | | | |
|--|--------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|---------|
|  | 368654 | 21G (0.8 мм) | 0.75" (19 мм) | 7" (178 мм) | Присоединенный держатель | Зеленый |
|  | 368652 | 21G (0.8 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Присоединенный держатель | Зеленый |
|  | 368655 | 23G (0.6 мм) | 0.75" (19 мм) | 7" (178 мм) | Присоединенный держатель | Голубой |
|  | 368653 | 23G (0.6 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Присоединенный держатель | Голубой |

Без Люер-адаптера

| | | | | | | |
|--|--------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---------|
|  | 367246 | 21G (0.8 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Без люер-адаптера | Зеленый |
|  | 367247 | 23G (0.6 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Без люер-адаптера | Голубой |
|  | 368383 | 25G (0.5 мм) | 0.75" (19 мм) | 12" (305 мм) | Без люер-адаптера | Синий |

BD Vacutainer® Одноразовый держатель

- Одноразовые
- Совместимы со всеми иглами и пробирками BD Vacutainer® и с флаконами для гемокультивирования BD Bactec™
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 250/1000

| | Каталожный номер | Описание | Цвет |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|
|  | 364815 | Одноразовый держатель | Прозрачный белый |

Многоразовый держатель BD Pronto™

- Многоразовые
- Совместимы со всеми иглами и пробирками BD Vacutainer® и с флаконами для гемокультивирования BD Bactec™
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 20/1000

| | Каталожный номер | Описание | Цвет |
|---|------------------|------------------------|--------------|
|  | 368872 | Многоразовый держатель | Разные цвета |

Адаптеры BD Vacutainer®

- Одноразовые
- Закрытая система для снижения травматизации
- Совместимы со всеми иглами и пробирками BD Vacutainer®

| | Каталожный номер | Описание | Цвет | Упаковка/ Транспортная коробка |
|---|------------------|--|------------|--------------------------------------|
|  | 367300 | Люер-адаптер для взятия крови из катетеров или для присоединения к канюлям люер. Безопасный клапан для заполнения пробирок | Синий | 100/1000 |
|  | 364902 | Адаптер BD Vacutainer® Luer-Lok™ | Прозрачный | 50/200 |
|  | 364810 | Устройство для переноса крови BD Vacutainer® | Прозрачный | 50/200 |

АКСЕССУАРЫ

Жгут BD Vacutainer® Stretch™

- Одноразовый
- Безлатексный
- Минимизирует риск инфицирования медработников и пациентов
- Удобная упаковка



| Каталожный номер | Описание | Упаковка/ Транспортная коробка |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| 367204 | Одноразовый жгут | 25/500 |

Многоразовый жгут BD Pronto™

- Многоразовый
- Безлатексный



| Каталожный номер | Описание | Упаковка/ Транспортная коробка |
|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 367218 | Многоразовый жгут | 6/60 |

Приспособление для получения капли крови из пробирки BD Vacutainer® DIFF-SAFE® *

- Одноразовые
- Приспособление для получения капли крови из закрытой пробирки — можно использовать для приготовления мазков крови
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000

*DIFF-SAFE™ — торговая марка компании Alfa Scientific Corporation



| Каталожный номер | Описание | Упаковка/ Транспортная коробка |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 366005 | Устройство DIFF-SAFE® | 100/1000 |

Штатив для пробирок



| Каталожный номер | Описание | Упаковка/ Транспортная коробка |
|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 368697 | Вмещает до 80 пробирок | 21 |

ЛАНЦЕТЫ

Контактно-активируемые ланцеты BD Microtainer®

- Одноразовые
- Безопасные
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 200/2000

| | Каталожный номер | Цвет | Тип ланцета | Глубина прокола | Размер лезвия | Объем крови |
|---|------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|
|  | 366592 | Сиреневый | Игла | 1.5 мм | 30G | Одна капля крови |
|  | 366593 | Розовый | Игла | 1.8 мм | 21G | Средний ток крови |
|  | 366594 | Голубой | Лезвие | 2 мм | 1.5 мм | Сильный ток крови |

Ланцеты для взятия крови из пятки BD Quikheel™

- Одноразовые ланцеты с автоматически убирающимся лезвием. Механизм невозможно активировать повторно, что исключает риск травматизации или повторного использования
- Разработано для прокалывания пятки новорожденных и детей до года
- Автоматически убирающееся лезвие
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/200

| | Каталожный номер | Цвет | Тип ланцета | Глубина прокола | Размер лезвия | Объем крови |
|---|------------------|---------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|
|  | 368102 | Розовый | Лезвие | 0.85 мм | 1.75 мм | Средний – высокий |
|  | 368103 | Зеленый | Лезвие | 1 мм | 2.5 мм | Высокий |

BD Microtainer® MAP Микропробирки для автоматического анализа

- Одноразовые стерильные пробирки размером 13 x 75мм
- Содержит 1 мг К2ЭДТА, распылением нанесенный на стенки пробирок
- Прокальываемая защелкивающаяся крышка
- Полноразмерная стандартная этикетка
- Объем крови 250–500 мкл
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/200



| | Каталожный номер | Реагент | Пробирка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|---------|------------|-----------------|-------------|
|  | 363706 | К2ЭДТА | Прозрачная | Защелкивающаяся | Сиреневая |

Специальная система закрывания крышки, обеспечивает более легкое снятие колпачка, надежно закрывает пробирку и препятствует вытеканию пробы при транспортировке в лабораторию



Прокальываемая крышка, совместимая с пробозаборниками анализаторов

Однокомпонентная пробирка размером 13x75 мм со встроенным коллектором

Три хорошо видимые напечатанные линии гарантируют правильный объем набираемой крови

Число перемешиваний указано на ярлыке пробирки

Полноразмерная стандартная этикетка **V-Notch™** с цветной полосой по краю облегчает наклеивание штрих-кода на пробирку



Упаковка подлежит вторичной переработке

1.0 мг К2ЭДТА
Объем 250–500 мкл
13x75 мм

Микропробирки для гематологии BD Microtainer®

- Одноразовые, стерильные пробирки для взятия крови
- Содержит 1 мг К2ЭДТА, распылением нанесенный на стенки пробирок
- Объем крови 250–500 мкл
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/200

| | Каталожный номер | Реагент | Пробирка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|---------|------------|---------------|-------------|
|  | 365975 | К2ЭДТА | Прозрачная | BD Microgard™ | Сиреневая |

Взятие капиллярной крови

Пробирки

БИОХИМИЯ

Микропробирки для сыворотки BD Microtainer®

- Одноразовые, стерильные пробирки для взятия крови
- Используются для получения сыворотки
- Объем крови 250 – 500 мкл
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/200

| <i>Каталожный номер</i> | <i>Реагент</i> | <i>Пробирка</i> | <i>Тип крышки</i> | <i>Цвет крышки</i> |
|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|  365964 | Пустая | Прозрачная | BD Microgard™ | Красная |

Пробирки для сыворотки с разделительным гелем BD Microtainer® SST™

- Одноразовые, стерильные пробирки для взятия крови
- Содержат разделительный гель и активатор свертывания
- Используются для получения и отделения сыворотки
- Пробирки янтарно-желтого цвета для защиты светочувствительных аналитов
- Объем крови 400 – 600 мкл
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/200

| <i>Каталожный номер</i> | <i>Реагент</i> | <i>Пробирка</i> | <i>Тип крышки</i> | <i>Цвет крышки</i> |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|  365968 | Активатор свертывания | Прозрачная | BD Microgard™ | Желтая |
|  365979 | Активатор свертывания | Янтарно-желтая | BD Microgard™ | Желтая |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Дополнительные приспособления BD Microtainer®

- Адаптер-удлинитель пробирок BD Microtainer®

| <i>Каталожный номер</i> | <i>Описание</i> | <i>Упаковка/ Транспортная коробка</i> |
|--|---|---------------------------------------|
|  368933 | Адаптер-удлинитель пробирок BD Microtainer® | 50/200 |

Микропробирки для плазмы BD Microtainer® (с гепарином)

- Одноразовые, стерильные пробирки для взятия крови
- Содержат гепарин лития
- Используются для получения плазмы
- Объем крови 200-400 мкл
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/200

| | Каталожный номер | Реагент | Пробирка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|  | 365966 | Гепарин лития | Прозрачная | BD Microgard™ | Зеленая |

Микропробирки для плазмы с гелем BD Microtainer® PST™

- Одноразовые, стерильные пробирки для взятия крови
- Содержат разделительный гель и гепарин лития
- Используются для получения и отделения плазмы
- Пробирки янтарно-желтого цвета для защиты светочувствительных аналитов
- Объем крови 400–600 мкл

| | Каталожный номер | Реагент | Пробирка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|  | 365986 | Гепарин лития | Прозрачная | BD Microgard™ | Светло-зеленая |
|  | 365988 | Гепарин лития | Янтарно-желтая | BD Microgard™ | Светло-зеленая |

Микропробирки для определения глюкозы BD Microtainer®

- Одноразовые, стерильные пробирки для взятия крови
- Содержат фторид натрия и ЭДТА
- Используются для получения плазмы и стабилизации глюкозы
- Объем крови 250–500 мкл
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 50/200

| | Каталожный номер | Реагент | Пробирка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|----------------------|------------|---------------|-------------|
|  | 365993 | Фторид натрия и ЭДТА | Прозрачная | BD Microgard™ | Серая |

Взятие артериальной крови

Шприцы

Шприцы BD Preset™

- Одноразовые, стерильные шприцы для взятия крови самозаполнением или аспирацией
- Для взятия артериальной крови
- Содержат лиофильно-высушенный гепарин лития, сбалансированный кальцием
- Количество в упаковке: 100

| | Каталожный номер | Объем (мл) | Размер иглы | Длина иглы | Защитное приспособление | Крышка |
|---|------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|
|  | 364413 | 1 | 23G (0.6 мм) | 1" (25 мм) | Slip Tip | Резиновый колпачок |
|  | 364415 | 1 | 25G (0.5 мм) | 1" (25 мм) | Slip Tip | Резиновый колпачок |
|  | 364416 | 1 | - | - | Slip Tip | Резиновый колпачок |
|  | 364314 | 3 | 22G (0.7 мм) | 1" (25 мм) | BD Luer-Lok™ | BD Hemogard™ + кубик |
|  | 364316 | 3 | - | - | BD Luer-Lok™ | BD Hemogard™ |
|  | 364327 | 3 | 23G (0.6 мм) | 1" (25 мм) | BD Luer-Lok™ | BD Hemogard™ + кубик |
|  | 364390 | 3 | 22G (0.7 мм) | 1" (25 мм) | BD Luer-Lok™ | BD Hemogard™ |
|  | 364391 | 3 | 23G (0.6 мм) | 1" (25 мм) | BD Luer-Lok™ | BD Hemogard™ |
|  | 364393 | 3 | 25G (0.5 мм) | 1" (25 мм) | BD Luer-Lok™ | BD Hemogard™ |

Шприцы BD A-Line™

- Одноразовые, стерильные шприцы для взятия крови аспирацией
- Для взятия артериальной крови
- Содержат лиофильно-высушенный гепарин лития, сбалансированный кальцием
- Количество в упаковке: 100

| | Каталожный номер | Объем (мл) | Размер иглы | Длина иглы | Защитное приспособление | Крышка |
|---|------------------|------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|
|  | 364356 | 1 | - | - | Slip Tip | Резиновый колпачок |
|  | 364378 | 3 | - | - | BD Luer-Lok™ | BD Hemogard™ |
|  | 364376 | 3 | - | - | Slip Tip | Резиновый колпачок |

Пробирки для общего анализа мочи BD Vacutainer®

- Одноразовые, стерильные, непротекающие вакуумные пробирки
- Консервант содержит 0.4% Хлоргексидина, 5.6% Этилпарабена и 94% Пропионата натрия
- Совместимы со всеми устройствами для взятия образцов BD
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000

| | Каталожный номер | Объем (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------------|---------------|
|  | 368500 | 4 | 13x75 | Без реагента | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Бежевая |
|  | 368501 | 6 | 13X100 | Без реагента | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Бежевая |
|  | 364992 | 8 | 16X100 | Консервант | Пластик | Бумажная | Резиновая пробка | Красно-желтая |
|  | 365000 | 9.5 | 16X100 | Без реагента | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Бежевая |
|  | 364938 | 10 | 16X100 | Без реагента | Пластик | Бумажная | Резиновая пробка | Желтая |
|  | 364915 | 11 | 16X100 | Без реагента | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Бежевая |

Пробирки для микробиологического анализа мочи BD Vacutainer®

- Одноразовые, стерильные, непротекающие вакуумные пробирки
- Пластиковые пробирки содержат Борную кислоту (2.63 мг на 1 мл мочи), Формиат Натрия (1.65мг/мл) и Борат натрия (2.08 мг/мл)
- Совместимы со всеми устройствами для взятия образцов BD
- Упаковка/Транспортная коробка, количество: 100/1000

| | Каталожный номер | Объем (мл) | Размер (мм) | Реагент | Материал | Этикетка | Тип крышки | Цвет крышки |
|---|------------------|------------|-------------|------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
|  | 364958 | 4 | 13x75 | Консервант для микробиологии | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Оливковая |
|  | 364959* | 4 | 13x75 | Консервант для микробиологии | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Оливковая |
|  | 364955 | 10 | 16X100 | Консервант для микробиологии | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Оливковая |
|  | 364944* | 10 | 16X100 | Консервант для микробиологии | Пластик | Бумажная | BD Hemogard™ | Оливковая |

* Входит в комплект с устройством для переноса мочи (См. стр. 34)

Взятие мочи

Дополнительные приспособления

Приспособления для взятия мочи BD Vacutainer®

- Одноразовые
- Часть закрытой системы BD Vacutainer® для взятия и транспортировки мочи
- Встроенное устройство для переноса мочи — 364941 и 364982
- Совместимы со всеми пробирками BD Vacutainer® для взятия и транспортировки мочи для общего и микробиологического анализа

| | Каталожный номер | Описание | Объем (мл) | Упаковка/ Транспортная коробка |
|---|------------------|--|------------|-----------------------------------|
|  | 364941 | BD™ Стерильный контейнер для взятия мочи со встроенным устройством для переноса | 120 | 100/200 |
|  | 364982 | BD™ Пластиковый контейнер для взятия суточной мочи, со встроенным устройством для переноса, янтарно-желтый | 3000 | 1/40 |
|  | 364940 | BD™ Устройство для переноса мочи | | 100/1000 |

ТРАНСПОРТИРОВКА

Коробки для транспортировки Немobox®

- Разработаны для безопасной транспортировки продукции BD Vacutainer®
- Удобны в использовании, практичны и безопасны

| | Каталожный номер | Описание | Размеры Длина X Ширина X Высота | Вес (г) | Вмещает | Упаковка/ Транспортная коробка |
|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 366903 | Немobox® 4 голубые | 150x100x70 | 175 | 8 пробирок 1 держатель 3 иглы | 24 |
|  | 366904 | Немobox® 4 зеленые | 150x100x70 | 175 | 8 пробирок 1 держатель 3 иглы | 24 |
|  | 366905 | Немobox® 4 красные | 150x100x70 | 175 | 8 пробирок 1 держатель 3 иглы | 24 |

Указатель

| Кат.№ Стр. | Кат.№ Стр. | Кат.№ Стр. | Кат.№ Стр. |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 301746.....23 | 364959.....33 | 367295.....25 | 368380.....15 |
| 301747.....23 | 364982.....34 | 367300.....26 | 368381.....15 |
| 301748.....23 | 364992.....33 | 367323.....24 | 368383.....25 |
| 360214.....23 | 365000.....33 | 367324.....24 | 368492.....12 |
| 360215.....23 | 365900.....17 | 367326.....24 | 368494.....14 |
| 360747.....23 | 365904.....12 | 367335.....24 | 368496.....14 |
| 360748.....23 | 365964.....30 | 367336.....24 | 368497.....14 |
| 361017.....19 | 365966.....31 | 367338.....24 | 368498.....13 |
| 362725.....19 | 365968.....30 | 367341.....24 | 368499.....17 |
| 362780.....20 | 365975.....29 | 367342.....24 | 368500.....33 |
| 362781.....20 | 365979.....30 | 367344.....24 | 368501.....33 |
| 362782.....20 | 365986.....31 | 367374.....14 | 368520.....15 |
| 362791.....20 | 365988.....31 | 367376.....14 | 368521.....15 |
| 362795.....20 | 365993.....31 | 367378.....14 | 368609.....22 |
| 362799.....20 | 366005.....27 | 367525.....17 | 368610.....22 |
| 363047.....16 | 366164.....18 | 367526.....14 | 368650.....22 |
| 363048.....16 | 366420.....21 | 367562.....16 | 368651.....22 |
| 363079.....16 | 366421.....21 | 367599.....16 | 368652.....25 |
| 363097.....16 | 366456.....21 | 367704.....16 | 368653.....25 |
| 363706.....29 | 366473.....21 | 367714.....16 | 368654.....25 |
| 364305.....16 | 366566.....13 | 367735.....15 | 368655.....25 |
| 364314.....32 | 366567.....14 | 367756.....19 | 368697.....27 |
| 364316.....32 | 366575.....16 | 367819.....12 | 368774.....13 |
| 364327.....32 | 366592.....28 | 367836.....17 | 368815.....12 |
| 364356.....32 | 366593.....28 | 367839.....17 | 368817.....18 |
| 364376.....32 | 366594.....28 | 367858.....17 | 368841.....17 |
| 364378.....32 | 366644.....13 | 367862.....17 | 368856.....17 |
| 364390.....32 | 366645.....19 | 367864.....17 | 368857.....17 |
| 364391.....32 | 366646.....16 | 367869.....14 | 368860.....17 |
| 364393.....32 | 366674.....18 | 367876.....14 | 368861.....17 |
| 364413.....32 | 366676.....18 | 367896.....12 | 368872.....26 |
| 364415.....32 | 366882.....13 | 367933.....15 | 368879.....13 |
| 364416.....32 | 366903.....34 | 367941.....18 | 368884.....14 |
| 364810.....26 | 366904.....34 | 367953.....13 | 368886.....14 |
| 364815.....26 | 366905.....34 | 367955.....13 | 368889.....14 |
| 364902.....26 | 367204.....27 | 367957.....13 | 368933.....30 |
| 364915.....33 | 367218.....27 | 368102.....28 | 369032.....12 |
| 364938.....33 | 367246.....25 | 368103.....28 | 762165.....20 |
| 364940.....34 | 367247.....25 | 368270.....17 | |
| 364941.....34 | 367282.....25 | 368271.....12 | |
| 364944.....33 | 367284.....25 | 368272.....14 | |
| 364955.....33 | 367286.....25 | 368273.....16 | |
| 364958.....33 | 367288.....25 | 368274.....17 | |

BD — ведущая международная медицинская технологическая компания, которая разрабатывает, производит и продает медицинские приспособления, оборудование и реактивы. Главная цель компании — укрепление здоровья людей во всем мире. Основные задачи BD — оптимизация качества и скорости диагностики инфекционных и онкологических заболеваний; разработка, открытие и производство новых лекарственных препаратов и вакцин. BD уделяет особое внимание борьбе с наиболее социально значимыми заболеваниями. Компания была основана в 1897 году, штаб-квартира расположена во Франклин-Лэйкс, США. В BD работает около 29 000 сотрудников в более чем 50 странах мира. Компания сотрудничает с различными лечебными и научно-исследовательскими учреждениями, клиническими лабораториями, фармацевтическими производствами. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.bd.com/ru.

BD Medical

BD Medical — один из ведущих поставщиков медицинских приспособлений и лидер в разработке инновационных решений для инъекционной и инфузионной терапии с 1906 года, когда компания построила первый в США завод по производству шприцев и игл. Основная задача BD Medical — разработка инновационных решений для снижения риска распространения инфекций, улучшения лечения диабета, доставки лекарственных препаратов.

BD Diagnostics

BD Diagnostics — ведущий поставщик продукции для безопасного взятия и транспортировки биологических образцов, а также анализаторов и систем реагентов для диагностики широкого спектра инфекционных и онкологических заболеваний. Основная задача BD Diagnostics — обеспечение лабораторий решениями, увеличивающими их производительность, сокращающими расходы и повышающими качество лабораторных исследований, и, тем самым, качество лечения пациентов.

BD Biosciences

BD Biosciences — мировой лидер в разработке инновационных диагностических и исследовательских инструментов для научных сотрудников, клинических исследователей, профессионалов лаборатории и клиницистов, которые участвуют в различных научных исследованиях, разработке и открытии новых лекарственных препаратов, биофармацевтическом производстве. Основная задача BD Biosciences — постоянное развитие клеточного анализа и продукции для культуральной диагностики.



BD Diagnostics - Preanalytical Systems
123 317 Москва
Пресненская наб., д. 10, бл. С,
Тел.: +7 495 775 85 82
Факс +7 495 775 85 83
«Горячая линия» + 7 800 200 80 40
EMA_PAS@bd.com
www.bd.com/ru

