

BD™ Blunt Fill und BD™ Blunt Filter

Sicherheitsaufziehkanülen mit und ohne Filter



Helping all people
live healthy lives

Ein sicherer Weg von der Vorbereitung des Medikaments bis zur Verabreichung



BD™ Blunt Fill und BD™ Blunt Filter Sicherheitsaufziehkanülen verfügen über einen stumpfen, polierten Anschnitt im 45°-Winkel. Dadurch kann das Risiko von Materialausstanzungen reduziert werden.

Durch den stumpfen Kanülenanschnitt wäre ein zehnfach höherer Kraftaufwand aufzuwenden, um die Haut zu punktieren, als mit einer Normkanüle.¹ Das Risiko für Stichverletzungen wird daher minimiert.

BD™ Blunt Filter Sicherheitsaufziehkanülen verfügen zusätzlich über einen 5µ Filter, der ein Aufziehen von Glaspartikeln und Schwebstoffen aus der Lösung verhindert.

Für Ein- und Mehrdosenbehältnisse:
BD™ Blunt Fill Kanülen ohne Filter: 305180



Für Ampullen:
BD™ Blunt Fill Kanülen mit Filter: 305211



¹ Haywood, Regina, RN, MSN; Karpf, Angela, MD: Eliminating Unnecessary Conventional Sharps during Medication Preparation: The BD™ Blunt Fill Needle, BD 5/02 - 0476

BD™ Blunt Fill und BD™ Blunt Filter

Sicherheitsaufziehkanülen mit und ohne Filter

Empfohlene Handhabung


SCHRITT 1

- Setzen Sie die BD™ Blunt Fill oder die BD™ Blunt Filter Kanüle fest auf eine Spritze mit Luer-Ansatz auf, bzw. drehen Sie die Kanüle fest in den Luer-Lock-Ansatz der Spritze ein.
- Ziehen Sie die Kanülenschutzkappe gerade von der Kanüle ab.
- Die Spritze kann nun zur Entnahme von Flüssigkeiten aus Ein- und Mehrdosenbehältnissen eingesetzt werden.
- Zur Entnahme aus Ampullen verwenden Sie bitte Sicherheitskanülen mit Filter (BD™ Blunt Filter Needles).



SCHRITT 2

- Setzen Sie die Kanüle im 90°-Winkel an und punktieren Sie den Verschluss des Behältnisses in der Mitte. Dadurch wird das Risiko von Ausstanzungen des Stopfenmaterials minimiert.
- Der Kraftaufwand, der benötigt wird, um den Behältnisverschluss zu punktieren ist nur ca. 2,5 mal höher als bei einer 18G Normkanüle.

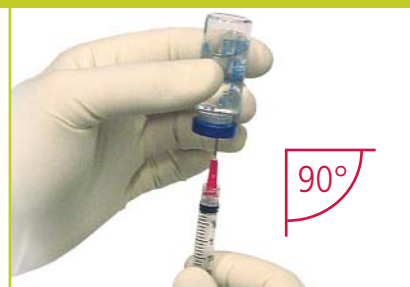

SCHRITT 3

- Falls Sie die Spritze direkt zur Punktion von Blutbeuteln oder i.v.-Systemen einsetzen, belassen Sie die Sicherheitsaufziehkanüle auf der Spritze.
- Wenn die Aufziehkanüle nicht benötigt wird, nehmen Sie die BD™ Blunt Fill bzw. die BD™ Blunt Filter Kanüle von der Spritze ab und entsorgen Sie diese in einen geeigneten Kanülenabwurfbehälter. Wir empfehlen Ihnen das BD™ Sharps Container Entsorgungssystem.

SCHRITT 4

- Die so befüllte Spritze kann nun mit nadelfreien Zugangssystemen eingesetzt werden (z.B. mit dem geschlossenen Zugangssystem BD Q-Syte™) oder zusammen mit einer geeigneten Injektionskanüle zur Injektion (z.B. mit einer BD Eclipse™ Sicherheitsinjektionskanüle).

Produktbeschreibung	Best.-Nr.	PZN*	VE / UK
BD™ Blunt Fill Needle, stumpfe Aufziehkanüle ohne Filter, rot 18 G 1 1/2", 1,2 x 40 mm, steril, latexfrei, PVC-frei	305180	4856353	100 St. / 1000 St.
BD™ Blunt Filter Needle, stumpfe Aufziehkanüle mit 5µ Filter, flieder 18 G 1 1/2", 1,2 x 40 mm, steril, latexfrei, PVC-frei	305211	4856235	100 St. / 1000 St.

* PZN: Pharmazentralnummer (gültig nur für Deutschland)



Deutschland:
BD

Tullastr. 8-12
69126 Heidelberg
Tel. 06221 3050
Fax 06221 305216
www.bd.com/de

Österreich:
BD

Concorde Business Park 1/E/1/7
2320 Schwechat
Tel. 01 7063660
Fax 01 7063660-11
www.bd.com

Schweiz:
Becton Dickinson AG

Postfach
4002 Basel
Tel. 061 4852222
Fax 061 4852200
www.bd.com/ch